


手動さく乳器 E-402

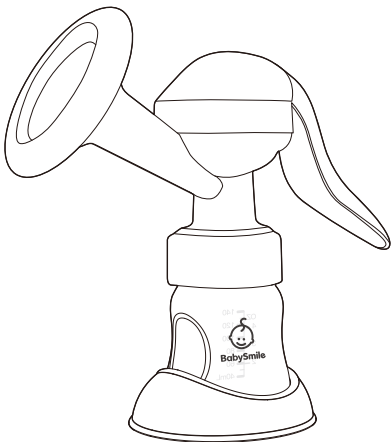

このたびは、「手動さく乳器 E-402」をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、適切にご使用ください。取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

警告サイン	説 明
	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号	説 明
	してはいけないこと（禁止）を示します。
	しなければならないこと（必ず守ること）を示します。


警告

	● 乳幼児の手の届く場所に放置しない 予期せぬけがの原因になります。 ● さく乳以外の目的で本製品を使用しない 予期せぬけがの原因になります。
	● 痛みを伴う場合は直ちに使用を中止してください。

注意

	● 火の近くに放置しない 破損の原因になります。 ● 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしない 破損の原因になります。 ● 産後までは本製品を使用しない さく乳は陣痛を誘発するおそれがあります。授乳期間中に妊娠した場合は、使用を続ける前に医療従事者に相談してください。
	● 使用前・使用後は全ての部品を分解し、洗浄消毒を行ってください。 ● 手と胸を清潔にしてからさく乳を開始してください。 ● さく乳をする際は、椅子やソファーなどにきちんと座ってリラックスした状態で行ってください。 ● 本製品を廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。

各部の名称および製品材質

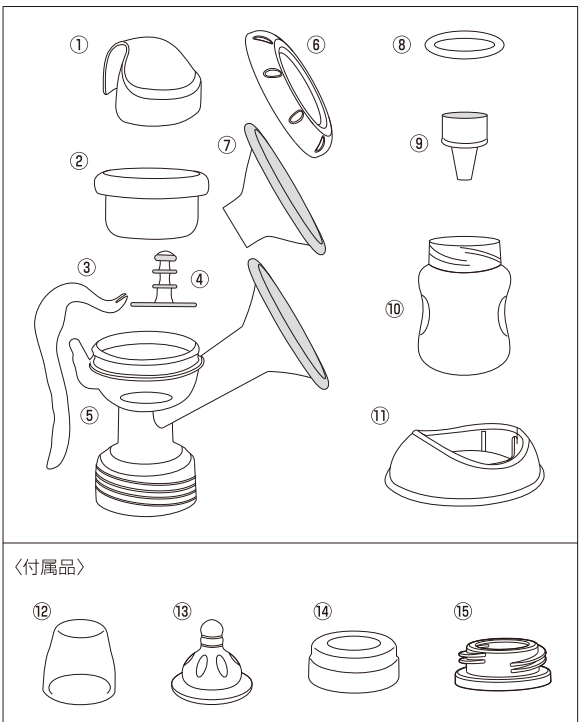

	名称	材質	耐熱温度
①	シリンダーカバー	ポリプロピレン	－20℃～120℃
②	シリンダー	シリコーン	－20℃～200℃
③	ハンドル	ポリプロピレン	－20℃～120℃
④	ピストン	ポリプロピレン	－20℃～120℃
⑤	本体	ポリプロピレン	－20℃～120℃
⑥	さく乳口カバー	ポリプロピレン	－20℃～120℃
⑦	シリコンカバー	シリコーン	－20℃～200℃
⑧	パッキン	シリコーン	－20℃～200℃
⑨	バルブ	シリコーン	－20℃～200℃
⑩	ボトル	ポリプロピレン	－20℃～120℃
⑪	ボトルスタンド	ポリプロピレン	－20℃～120℃
⑫	ボトルフード	ポリプロピレン	－20℃～120℃
⑬	乳首	シリコーン	－20℃～200℃
⑭	キャップ	ポリプロピレン	－20℃～120℃
⑮	ボトルアダプタ	ポリプロピレン	－20℃～120℃

使用方法

ご使用の前に

- ・ 購入時にセットされている部品は全て分解し、洗浄・消毒・乾燥を行ってからご使用ください。
- ・ 手と胸を清潔にしてからさく乳を開始してください。


1. さく乳器が正しく組み立てられていることを確認してください。
2. 乳首がシリコンカバーの中心にくるように装着します。空いている手で乳房を支えながら装着させると空気が漏れず密着しやすくなります。
3. ハンドルを軽く素早く押して、乳房を刺激します。ハンドルを最後まで押さず、半分押した時点で手を離してください。
4. 母乳が出始めたら、プレス速度を1～2秒間隔まで遅くします。
※くぼみの位置を切り替えることで強さを変更できます。
※さく乳開始時はファーストステップ（図1）、母乳が出始めたらセカンドステップ（図2）に切り替えてしっかりとさく乳をします。（【レベルの切り替え】を参照してください。）
5. さく乳が終わりましたら、乳房からさく乳器を取り外し、ボトルに付属品を装着します。すぐにご使用にならない場合は、冷蔵庫または専用の保管容器/保管袋で冷凍庫に保存します。（【母乳の保管方法のガイドライン】を参照してください。）

組立方法



※さく乳口カバーとボトルスタンドは保管の際にご利用ください。付属品はボトルにセットするとそのまま哺乳瓶として使えます。

レベルの切り替え

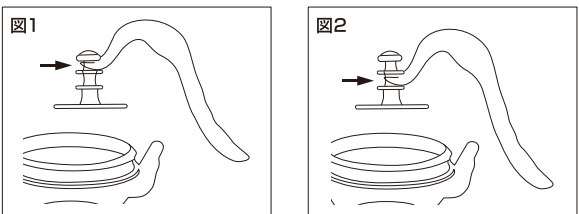

ファーストステップ
ピストンの上のくぼみ。
さく乳開始時に使用します。

セカンドステップ
ピストンの下のくぼみ。
母乳がしっかりと出始めたらセカンドステップに切り替えます。

お手入れ

ご使用後はすぐに全ての部品を分解し、お手入れをしてください。

1. 中性洗剤を使い、部品を全て洗ってください。
2. 煮沸消毒か薬液消毒をしてください。
 - ・ 煮沸消毒: 水たっぶりのなべに入れ、少なくとも10分間煮沸してください。部品がなべ底に直接触れないよう注意してください。
 - ・ 薬液消毒: 哺乳瓶・乳首専用の消毒液に規定時間つけて消毒をします。
3. 清潔な未使用のふきんまたはペーパータオルの上で自然乾燥させてください。
4. 乾燥させた部品を清潔な密閉容器/袋に入れて保管してください。

母乳の保管方法のガイドライン

さく乳後直ちに使用しない場合は冷蔵庫あるいは冷凍庫で保存してください。母乳は哺乳瓶や冷凍用保存袋に移して保存してください。

	冷蔵保存	冷凍保存
さく乳直後の母乳	24時間以内に使用	3ヶ月以内に使用
解凍後の母乳	24時間以内に使用	再冷凍不可

解凍方法

加熱しすぎると免疫物質が破壊されてしまいます。熱湯や電子レンジでの解凍はおやめください。冷凍庫から冷蔵庫に移して数時間保存するか、ぬるま湯（40℃前後）で湯せんしてください。

こんなときは

症状	考えられる原因	対処方法
吸引が弱い	部品の欠如・破損	全ての部品、特にバルブに破損や劣化がなく、正しく組み立てられていることを確認してください。
	シリコンカバーが乳房に密着していない	乳首がシリコンカバーの中心にくるようにセットし、空気がもれないように密着させてください。
さく乳できない	部品の欠如・破損 乳腺の詰まり	吸引力があることを確認してください。ない場合は全ての部品が正しく付いていることを確認してください。リラックスした状態で胸が詰まっていることを確認してください。

製品仕様

製品	手動さく乳器 E-402
製品サイズ／質量	本 体：約W200×D90×H210mm／約165g ボトル：140ml
付属品	ボトルフード、乳首、キャップ、ボトルアダプタ、取扱説明書（本紙）

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証書

1. 保証期間はご購入後1年間です。
2. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
3. 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
4. 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示の上、お客様サービスセンターにご連絡ください。
5. 保証期間内でも下記の場合は保証の対象とはなりません。
 - （ア）誤った使用、不注意による故障、または損傷の場合
 - （イ）保管上の不備・ご使用者様の責によると認められる故障・損傷・紛失の場合
 - （ウ）分解、改造などを行った場合
 - （エ）本保証書の提示がない場合、保証書の内容を書き換えられた場合

製品	手動さく乳器 E-402
お買い上げ 年月日	年 月 日 (保証規定に従ってご購入日より1年間保証いたします)
ご購入者様	お名前 ご住所 電話番号
販売店様	お名前 ご住所 電話番号
製造・販売元	シースター株式会社 〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号 お客様サービスセンター https://www.seastar.co.jp/contact/ ℡03-4511-8855 (土日祝・夏季および年末年始休業を除く)

