

おでこにかざして
約 0.1 秒

※ センサー測定時間



ベビースマイル Pit + 非接触式体温計 S-708 Ver.3.0

かんたん操作ガイド

ベビースマイル Pit プラスは、
おでこで体温を測ります。



なぜおでこで測るの？

理想的な体温測定は、体の中心部の温度を測定することです。体温は、体の中心に近ければ近いほど、体の外の環境に影響されにくく、正確な数値が測定できます。

「おでこ」は、体の中心部の温度を反映する特性があるため、体温測定に適しているといわれています。


どうやって測っているの？

ベビースマイル Pit プラスは、皮膚から出ている赤外線を測定センサで感知し、舌下体温に変換して測定しています。

※皮膚表面が冷えている場合、実際より体温が低く測定される場合があります。

体温計アプリのご使用方法については、裏面の「シースター体温計シリーズ データ通信ガイド」をご確認ください。

体温の測り方

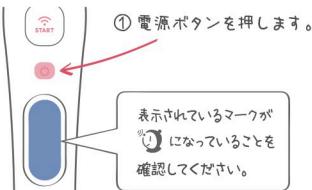

② 本体をおでこの中心部にかざし、START ボタンを押してください。



NG



！測定の際はご注意ください。

体温計と測りたい物の距離は4cm以内に。
垂直になるようにしてください。



体温計やおでこが冷たいと正しく測れません。15℃以上の室内で30分以上経過してから測ってください。


！注意

プラスチック製品などの温度が伝わりにくい容器をお使いの場合は容器の側面からではなく、上から中身に直接かざすようにしてください。




電源 ON/OFF

電源ボタンを押すと電源が入ります。8秒ほど長押し、もしくは60秒放置すると電源が切れます。

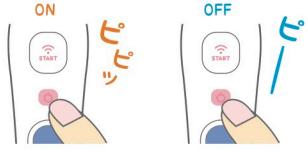

メモリー機能について

電源が入った状態で、電源ボタンを押すとメモリー表示モードのマークが表示され、過去25回の測定結果を確認することができます。

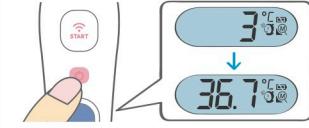

測定モード切替方法

① 電源がオンになっている状態で、電源ボタンを押しながら START ボタンを押します。



② START ボタンを押すごとに、体温計モードと温度計モードを交互に設定できます。



サイレントモード切替方法

① 電源がオンになっている状態で、電源ボタンを3秒ほど長押しします。



② サイレントモードのマークが表示され、指を離せば設定完了です。



！注意

- ・ 温度計モードでは内部の温度ではなく、表面の温度を測定します。ミルクや離乳食、お風呂などの温度は測定の直前によくかき混ぜてください。
- ・ 周囲温度により、測定結果に誤差が生じる場合があります。体温の変化を測定したい場合はできるだけ同じ環境でご使用ください。(連続して測定する際はピーブ音が2回なるまで待ってください)。
- ・ 防水仕様ではありませんので、本体に水などの液体がかからないようにしてください。浴室など温湿度の多い場所で使用した際は、速やかにその場から離し、室温で保管してください。

故障かな？と思ったら

エラー表示	問題点	解決方法
Er 1	測定準備ができていません。	連続で測る場合、ピーブ音が2回鳴り、マークが点滅しなくなったら測定してください。
Er 5 & Er 9	システムが正常に作動していません。	電池を取り外し、1分間待ってください。その後電池を入れ直し、電源を入れてください。
Er 3	周囲の温度が使用温度範囲外です。	10℃~40℃の部屋に30分程度置いてください。
Lo	温度が表示温度範囲未満です。	体温計モードの表示温度範囲は34.0~42.2℃です。
Hi	温度が表示温度範囲を超えてます。	温度計モードの表示温度範囲は-22.0~80.0℃です。

うまく測れない場合は以下の点をご確認ください。

- ・同じ時間、同じ環境で使用していますか？
- ・測定部から離さずしていませんか？また、測定センサと垂直になっていますか？
- ・ピッピ音がなり終わる前に動かしたりしていませんか？
- ・汗や髪の毛など、障害物はありませんか？
- ・扇風機や、エアコンなど風や熱気の当たる場所で測定していませんか？

※詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。

Q. 脇で測る体温と温度が違うんですが…

本製品はおでこの温度を、人間の体内温度に近い舌下体温に補正して表示します。一般的な脇で測る体温計の温度と比べ、舌下体温は0.2℃程高くなり、温度差が生じる場合があります。(個人差があります)

Q. 体温がうまく測れず、低く表示されます。

体温が著しく低く測定される、温度に誤差を感じた場合は、少しずつ場所をすらしながら2、3回測定して、もっとも高い数値を測定温度としてください。

また、計測部が冷えている場合は、計測部を20分程度室温に慣らしてください。

Q. 体温計なのに、ミルクの温度も測れるの？

はい。温度計モードは物や室温などの温度を測ることができます。物の場合は内部の温度ではなく、表面の温度を計測しますので、ミルクや離乳食、お風呂などの温度は測定の直前によくかき混ぜてください。

その他何か不明点などでございましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先：03-4511-8855 (平日 9:00~18:00 土日祝を除く)