

# シースター体温計シリーズ アプリケーション操作説明書

## 本操作説明書について

本操作説明書の一部または、全部について写真、複写、検索システムへの保存または、他の言語への翻訳を含む電气的手段、機械的手段および、その他のいかなる方法によっても複製または、転用することを禁じます

### △注意

- ・お使いになる端末の種類やバージョンにより、画面の構成や表示が本操作説明書と異なる場合があります。
- ・お客様のご使用環境により、ご利用戴けない場合やご利用内容に制限が生じる場合があります。  
また、ご使用のインターネットの環境や設定により、一部機能が制限される場合があります。
- ・アプリケーション(以下「アプリ」と表記します)の仕様および、画面は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 商標について

- ・ Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod touch は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。  
Apple Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- ・ Android および Google Play は Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、これらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および上記以外の登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

## 1.動作環境・仕様について

対応 OS :

- ・ ios10.0 以降 (iphone5 以降)
- ・ Android5.0 以降

通信距離：見通し 10m(最大)

※通信距離は機器の性能や電池残量、周囲の環境などに依存します。

## 2.アプリのインストール

- 2-1 スマートフォンの端末を用意し、ネットワーク環境に接続してください。
- 2-2 Apple Store あるいは Google Playストアから、専用アプリ「体温くん」をダウンロードし、インストールしてください。(無償)
- 2-3 タブレット端末には対応しておりません

アプリをApple Storeで  
ダウンロード



アプリをGoogle Playで  
ダウンロード



### 3.アプリの起動・体温計とのペアリング(初期登録)

- 3-1 スマートフォンのBluetooth機能と位置情報をONにしてください。
- 3-2 専用アプリ「体温くん」のアイコンをタップし、起動します。
- 3-3 体温計の電源を入れます。



- 3-4 ホーム画面左上部の「」ボタンをタップすると、Device Connectionの画面に移動します。



体温計とペアリング(初期登録)できた場合は「Radiant\_UART Connected」と表示されます。

ペアリング(初期登録)できない場合は「There is no device」と表示されます。

ペアリング(初期登録)できない場合は以下を確認してください。

- ・体温計の電源が入っていない→**体温計の電源**を入れてください。
- ・位置情報がONになっていない→**位置情報をON**にしてください。



「Bluetooth is not turned on!」と表示される場合は、Bluetooth機能が ON になっていない状態を示しています。[Bluetooth 機能を ON](#) にしてください。



## 4. 体温の測定と記録

4-1 アプリを起動し、体温計の電源を入れます。

ホーム画面左上に「Connected」の文字が表示されると、体温計と接続が完了し、通信可能になります。

その他の表示の意味

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 「Scanning」                    | 体温計を探しています。<br>※ Scanning の表示が継続される場合は、「3. アプリの起動・体温計とのペアリング」に記載の、体温計とのペアリングを行ってください。 |
| 「Connecting」                  | 体温計と接続中です。  |
| 「Bluetooth is not turned on!」 | Bluetooth 機能が ON になっていません。  |



- 4-2 体温計をおでこにかざし、体温を測定すると、画面に測定数値が表示されます。同時にアイコンをタップすることで、体調や解熱薬の投与を記録できます。



Note・・・メモ欄




- 4-3 画面右上の「✓」をタップすると体温や体調が記録されます。「✕」でキャンセルされます。

## 5.記録を見る

- 5-1 ホーム画面右下の「Temperature Record」をタップすると、グラフ/リスト表示画面に移動します。  
1画面に表示されるグラフは8件までです。  
8件を超えると、次のページに移動します。

- 5-2 日付部分をタップするとカレンダーが開き、過去のデータを見ることができます。

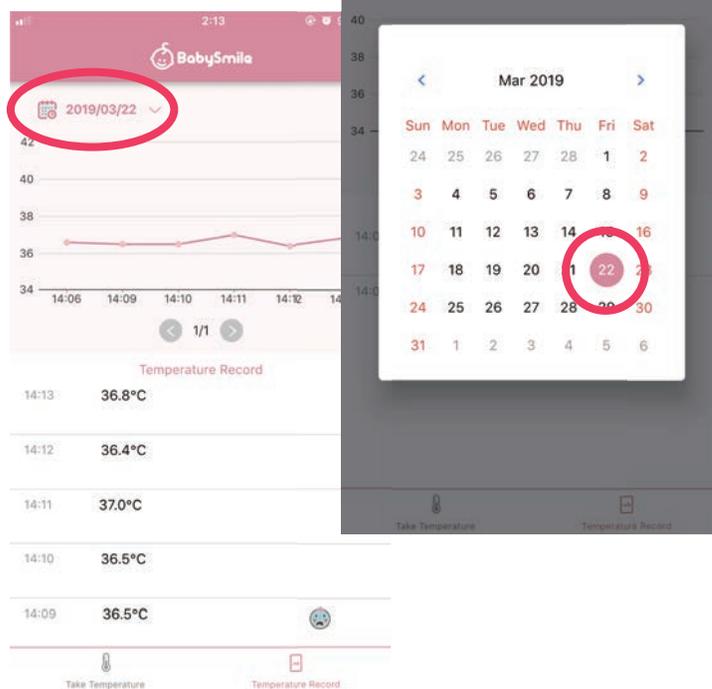

## 6.記録を閲覧・編集・削除する

6-1 リストの行か、グラフの点をタップすると、記録画面に移動します。

6-2 記録画面右上の「」マークをタップすると、記録を編集・削除することができます。

