

こども用遺伝子検査キット

Dream Guide

DNA test for children


ご利用ガイド

この度は、Dream Guideをご購入いただき、誠にありがとうございます。
結果レポートを受け取るまで、本紙を紛失しないよう大切に保管してください。

内容物確認

下記のもの全て揃っているかご確認ください。

唾液採取キット

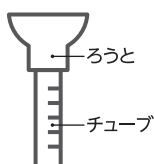

チューブのふた



保存液



ご利用ガイド(本紙)



ジッパー付ポリ袋



返送用郵便封筒(切手不要)



【よくあるご質問】

1. 検査受付期限はいつまでですか？

検査キットを受け取り後3ヶ月以内に唾液を採取してご返送ください。
また、唾液採取後は可能な限り翌日までに投函してください。

2. 唾液採取を失敗しました。チューブは洗って使えますか？

雑菌やほこり、水道水に含まれる塩素の影響を受けますので使えません。

3. 保存液をこぼしてしまいました。

保存液が半分以上残っている場合、唾液と保存液を1:1の状態にしてお送りください。保存液をこぼして残っていない場合、またはチューブ、チューブのふた、保存液を破損・紛失してしまった場合、検査キットのみを3,300円(税込)でご購入していただく必要がございますので、当社にご連絡ください。

4. 再検査について

口腔内に食品やミルク、歯磨き粉などが残っていると正確な結果が出ません。
その場合は弊社から再検査のご連絡をいたします。

5. 返品について

購入後8日以内、かつ未開封品に限り返品を受け付けます。
(開封後の返品は一切受付いたしかねます。)



01

「検査キットの登録」および「同意書」をご確認ください

二次元コードにアクセスし、アカウントを作成してください。
ログイン後、「検査キット登録」より登録と同意書の確認をお願いします。

シール貼付

お子さまのお名前

結果レポートはIDでご案内します。複数ご購入された方は、お子さまのお名前を記入して保管することをおすすめします。

02

【注意】唾液採取する前に注意事項をご確認ください

採取する30分前に歯磨きをし、しっかり口をすすいでください。それ以降、飲食はしないでください。

低月齢のお子さまなど、まだ歯磨きができない場合、そのまま採取すると不純物が入る可能性が高い為、ガーゼで清掃してあげてから唾液を採取してください。

唾液は赤いラインまで入れてください。

保存液はお子さまの手が届くところに保管しないでください。

唾液採取に失敗したり、保存液をこぼしてしまった場合は「よくあるご質問」をご確認ください。

03

唾液腺マッサージを行い、唾液を採取する

直接採取が難しい場合は、使い捨てのスプーンやスポイトの使用をおすすめします。
その際は、必ず新品かつ清潔なものをご使用ください。

① あごの唾液腺を20回マッサージ。



耳の下の付け根付近から前に向かって指で押しながらくぐりと回す。

② 唾液を口の中にとめます。



③ 泡を除いた唾液量で赤いラインまで唾液を入れてください。



「痰」は入れないでください。

注意 唾液量が足りない場合、正確な結果が出ず再検査となる場合がございます。

04


保存液を加え、ふたを閉める

① 唾液採取キットに**保存液**を全部入れてください。

※Preservation bufferと書かれているものが保存液です。



② ろうと（口が接していた部分）を外してふたを取り付け**しっかりと閉めます。**

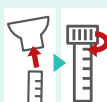

③ 唾液と保存液がよく混ざるように、10秒ほど軽く左右に振ってください。



④ チューブ（唾液の入った容器）をジッパー付ポリ袋に入れ、ジッパーを**しっかりと締めます。**



05


唾液を採取した後は、可能な限り翌日までにご返送ください

① 採取した唾液は日の当たらない涼しい場所で保管してください。



遺伝子抽出の失敗原因に繋がる恐れがある為、冷蔵庫・冷凍庫保管はしないでください。

② 返送用郵便封筒の裏面に必要情報を記入してください。次にチューブの入ったジッパー付ポリ袋を中に入れ、最後に「発送前確認項目」をチェックして封をしてください。

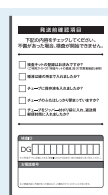

③ 返送用郵便封筒（切手不要）は郵便ポストや郵便局からご送付ください。



06

結果報告



検査が完了しましたら、メールで結果レポートをお送りいたします。
（検査結果が出るまで約1ヶ月かかります。）

本書にありますパスワードにてファイルを開き、内容をご確認ください。