


機械器具 32 医療用吸引器  
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ(JMDNコード:38749000)

## 透明 ロングシリコンノズル ボンジュール プラス

### 【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状・構造

本品は軟性の吸引管である。

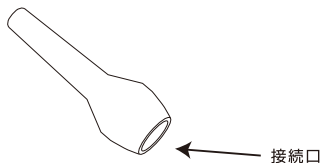

#### (2) 原材料

シリコンゴム

#### (3) 原理

電動式吸引器などに接続して得られた陰圧によって、鼻腔内の鼻汁などを吸引する。

### 【使用目的又は効果】

治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節する。本品は汎用吸引チップで再使用可能である。

### 【使用方法等】

#### (1) 使用方法

- ① 使用前に必要な応じて洗浄する。
- ② 本品の接続口に、電動式吸引器の吸引口を接続する。

#### (2) 組み合わせて使用可能な電動式吸引器

販売名

- ・ベビースマイル S-301
- ・ベビースマイル S-302

#### \*\*・ベビースマイル S-303

- ・メルシーボット S-501
- ・メルシーボット S-502

#### \*・メルシーボット S-503

### \*【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- ・本品を鼻腔内に挿入する前に陰圧をかけると、本品の先端が周囲の粘膜に付着し吸引できないことがあるので注意すること。
- ・鼻汁の吸引以外の用途に使用しないこと。
- ・吸引する際には、専用の併用医療機器に本品の接続口が確実に取り付けられていることを確認すること。[陰圧を維持できない]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### <保管方法>

清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。

### 【保守・点検に係る事項】

#### (1) 清掃

- ① 水で軽く湿らせた布で汚れた部分を拭き取る。
- ② 清潔で乾いた布でもう一度拭き、衛生的な場所で乾燥させる。

#### (2) 洗浄

- ① 使用後はきれいな水を用いてよく通水洗浄する。
- ② 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した鼻汁などは直ちに洗浄する。
- ③ 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)などは、表面を損傷するので、使用を避けること。
- ④ 洗浄後は、直ちに乾燥する。

### 【包装】

- ・1セット/包

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 : シースター株式会社  
電話番号 : 03-6711-5500  
製造業者名(国名) : Baby Health Care, Inc.(台湾)