



E-601 センサスマート体組成計 Ver.1.0

ご使用の前に、本取扱説明書をお読みいただき、適切にご使用ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

警告サイン	説明
警告	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
注意	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

警告


- ・医用電気機器（ペースメーカー等の植込み型、人工心臓等の生命維持用、心電計等の装着型）と併用して本製品を使用することは絶対にしないでください。
- ・小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。
- ・航空機内や病院等、無線通信が禁止された場所では使用しないでください。本体または他機器の誤動作の原因になります。
- ・体が濡れている状態の時や、滑りやすい場所での使用はしないでください。転倒やけがの恐れがあります。
- ・介助が必要な方や小さなお子様には、一人で使わせしないでください。

注意

- ・病院などでの測定には使用しないでください。
- ・通信機能付きの機器や電磁波を発生する家電製品の近くでは使用しないでください。
- ・分解や水洗いはしないでください。
- ・本体を落下させたり、本体の上で飛び跳ねる等、強い衝撃を与えないでください。
- ・新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください。
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、空調機の風が当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、温度変化の激しい場所では保管しないでください。


各部の名称

(本体)
SETボタン
電源 オン、ユーザー情報の設定などに使います。

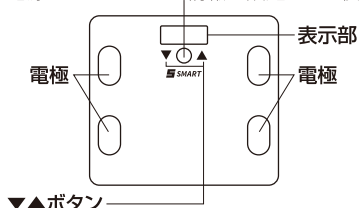

▼▲ボタン
ユーザー情報の設定や切り替えなどに使います。


(表示部)
電池残量マーク
電池残量が少ない時に点滅します。

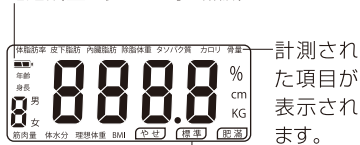

計測データをもとに「やせ」「標準」「肥満」の3段階で表示します。

電池の入れ方

1. 裏面の電池カバーを取り外してください。
2. 電池のプラス側とマイナス側の向きを確かめて、新しい電池を取り付けてください。
3. 電池カバーを取り付けます。

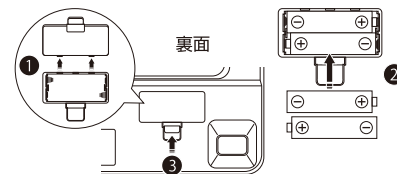

個人データの登録と測定

体組成を計測するためには、個人データの登録が必要です。本機には最大10名分（ユーザー番号0～9番）の個人データを登録できます。

1. SETボタンを押して電源を入れます。
2. [0.0KG]が表示されたらもう一度SETボタンを押します。
3. ユーザー番号、性別、身長、年齢を順番に登録します。▼▲ボタンで選択・設定、SETボタンで決定を行います。
4. [0.0KG]が表示された後、素足で本機に乗ります。最初に体重が表示され(1)、次に[000]が表示されます(2)。その後各項目の測定結果が表示されます(3)。



選択中の設定項目が点灯します。

【測定項目】

体重を含む12種類の健康データが順番に表示されます。
①体重 ②体脂肪率 ③皮下脂肪 ④内臓脂肪 ⑤除脂肪体重 ⑥タンパク質 ⑦カロリー ⑧骨量 ⑨筋肉量 ⑩体水分率 ⑪理想体重 ⑫BMI

5. 本機から降ります。
※測定後、約2分後に自動で電源が切れます。

＜ユーザー番号を選択して測定する＞

1. SETボタンを押して電源を入れます。
2. [0.0KG] と表示されたらもう一度SETボタンを押します。
3. ▼▲ボタンで登録済みのユーザー番号を選択し、SETボタンで決定します。
4. 前回登録した性別、身長、年齢を確認の上、それぞれSETボタンで決定します。
※身長や年齢など、変更が必要な場合は▼▲ボタンで選択・設定してください。
5. [0.0KG]が表示された後、素足で本機に乗ります。最初に体重が表示され(1)、次に[000]が表示されます(2)。その後各項目の測定結果が表示されます(3)。
6. 本機から降ります。
※測定後、約2分後に自動で電源が切れます。
※電池交換を行うと、前回の登録データが消去されます。



＜体重のみの測定方法＞

体重のみを計る場合、個人データの登録は不要です。電源オフの状態ですぐに本機に乗って測定してください。（素足以外でも測定可能です）※測定後約10秒後に自動で電源が切れます。

こんなときは

症状	原因	対処の方法
本機に乗っても[0.0KG]と表示される。または極端に測定値が少ない。	[0.0KG]と表示される前に本機に乗った。	表示が[0.0KG]になってから本機に乗ってください。
[n5t]と表示される。	システムが正常に機能していません。	お客様サービスセンターにご連絡ください。
[Erb]と表示される。	素足で測定していない。	体組成を計測する際は素足で本機に乗って測定してください。
	電極部のフィルムがはがされていない。	電極部のフィルムをはがして測定してください。
測定値が極端に高い、または低い。測定のたび極端に値が変わる。	正しい姿勢で測定していない。	測定中は膝を曲げず、足裏を電極に密着させてください。
	じゅうたんなどのやわらかい床面や凸凹のある床面で測定している。	硬く平らな床面で測定してください。
	血行が悪くなり足裏が冷えている。	体を温めるなどして、血行が通常の状態に戻ってから測定してください。
	電極部が冷たくなっている。	本機を暖かい部屋等にしばらく置いて、電極を触っても冷たく感じない程度になってから測定してください。
	足裏が乾燥している。	濡らしたタオルなどで足裏を少し湿らせてから測定してください。
体重表示後、体組成の測定が開始されない。	個人データを登録していない。	計測する際は、個人データの登録が必要です。
電源を入れる、または本機の上に乗っても、何も表示されない。	電池が入っていない。または電池が正しい向きで入っていない。	電池の向きを確認して、正しく入れてください。
	電池残量が少なくなっている。	新しい電池に交換してください。
SETボタンを押しても動作しない。	SETボタンに水や汚れが付いている。	水や汚れをやわらかい布で拭きとってください。

保管とお手入れ

- ・本体を水洗いしないでください。本体の汚れは乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ・汚れがひどい時は、水または中性洗剤をしみこませたよく絞った柔らかい布でふき取り、その後乾拭きしてください。
- ・ベンジンやシンナーなどを清掃に使用しないでください。
- ・次の場所では保管しないでください。
水のかかるところ、高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこり・塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ、傾斜・振動・衝撃のあるところ、化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
- ・本機に物を載せた状態や裏返した状態で保管しないでください。

仕様

製品名	E-601センサスマート体組成計	保管環境	-20～+60℃
表示	体重1～180kg	温湿度	90%RH以下(結露なきこと)
電源	単4形アルカリ乾電池2本	重量	約1.2kg(電池含む)
使用環境	-10～+40℃	外形寸法	約幅290×奥行260×高さ22mm
温湿度	80%RH以下(結露なきこと)		

付属品

- 単4形アルカリ乾電池2本(お試用)
- メジャー
- 取扱説明書兼保証書(本書)

保証規定

1. 保証期間はご購入後1年間です。
2. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
3. 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合に限り、無償交換いたします。
4. ご使用中に故障が発生した場合は、お客様サービスセンターまでご連絡ください。
5. 保証期間内でも下記の場合は保証の対象とはなりません。(ア)誤った使用、不注意による故障、または損傷の場合 (イ)保管上の不備・ご使用者様の責によると認められる故障・損傷の場合 (ウ)分解、改造などを行った場合 (エ)本保証書の提示がない場合、保証書の内容を書き換えた場合

商品名	
お買い上げ年月日	年 月 日
ご購入者様	
ご住所	
電話番号	
販売店様	
販売店電話番号	

お客様サービスセンター 03-4511-8855 (平日9～18時)
(土日祝日・夏季および年末年始を除く) <https://www.seastar.co.jp>

販売元 シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号