


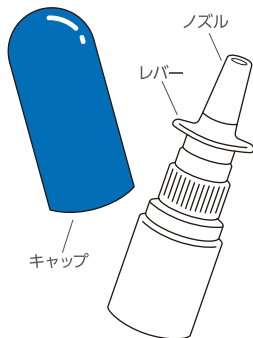

鼻の中をうるおして 鼻水吸引をスムーズに

- しつこい鼻水の吸引をサポート
- 肌にやさしい無添加
- ワンプッシュで素早くスプレー



商品詳細は
こちら

お客様サービスセンター

☎03-4511-8855

平日9時～18時(土日祝日除く)

使用目的又は効果

外鼻孔から溶液を注入する器具

【禁忌・禁止】

- 鼻の炎症、鼻づまりがひどいときには使用しないでください。
- 嚥下障害がある方は使用しないでください。[洗浄液が気管支や肺に入る恐れがあります。]
- 鼻腔内の洗浄にのみ使用し、目や耳に使用しないでください。

ご注意

●使用の際には箱に記載の説明をよく読んでください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●本製品は鼻水や鼻詰まり等の症状を改善するものではありません。●耳鼻咽喉科などで治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。●直射日光や高温の場所を避け、涼しい所でキャップをして保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●使用中に万が一異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。●他の容器に入れ替えないでください。[誤用の原因になり品質が変わることがあります。]●他の人と共用しないでください。●開封後は早めに使い切ってください。●ノズルの先を尖った物で突かないでください。



箱
ラベル



ボトル
ノズル
キャップ

MADE IN JAPAN

JAN



4 580211 772751



鼻水スプレー

E-701

吸引器をつかう前に



しつこい鼻水に



ADDITIONAL
FREE

無添加



簡単ワンプッシュ

30mL

3ヶ月^{生後}

医療機器

Home Medical

特徴

鼻腔内を溶液で潤し、鼻水吸引器の使用を補助します。

使用方法

鼻水を吸引する前にご使用ください。1日何回でも使えます。

- 1.キャップを外します。
- 2.ノズルの先端を鼻の中に入れます。
- 3.レバーを押してスプレーします。



※初めて使用する際は洗浄液が噴霧されるまでレバーを数回押ししてください。
※スプレーした液体は強く吸い込まないでください。[洗浄液が気管支や肺に入る恐れがあります。]

- 4.ノズルの先を鼻の外に出してから、レバーを緩めてください。

※鼻の中に入れたままレバーを緩めると、鼻水等が容器の中に逆流することがあります。※使用後は液が鼻から流れ落ちますので、ティッシュ等で拭き取ってください。※使用後はノズルの先が鼻水で汚れやすくなります。ティッシュ等で拭いて清潔にしてください。※上を向いて使用しないでください。[耳の内部に洗浄液が入り、中耳炎になる恐れがあります。] ※洗浄後に強く鼻をかまないでください※衣服などが液で濡れないようご注意ください。

【使用開始目安】生後3ヶ月～

【成分】

塩化ナトリウム、ベンゼトニウム塩化物、精製水

【保管方法】

●直射日光や高温の場所を避け、涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

【製造販売元】シースター株式会社
東京都港区港南一丁目2番7号

一般医療機器 鼻用洗浄器(41599000)
製造販売届出番号 13B1X10068000205
2022年11月1日(第1版)