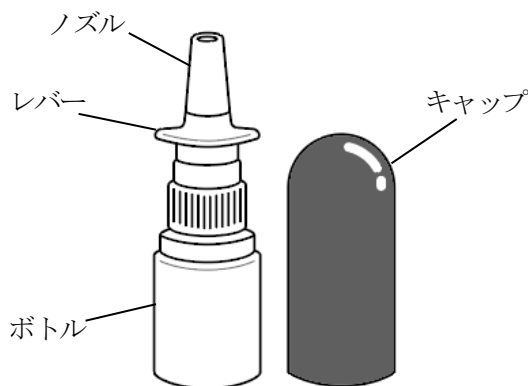


機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 鼻用洗浄器 (JMDNコード:41599000)E-701 鼻水スプレー**【禁忌・禁止】**

- 鼻の炎症、鼻づまりがひどいときには使用しないでください。
- 嚥下障害がある方は使用しないでください。[洗浄液が気管支や肺に入る恐れがあります。]
- 鼻腔内の洗浄にのみ使用し、目や耳に使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】**成分**

塩化ナトリウム、ベンゼトニウム塩化物、精製水

内容量

30 mL

【使用目的又は効果】

外鼻孔から溶液を注入する器具

【使用方法等】

1. キャップを外します。
2. ノズルの先端を鼻の中に入れます。
3. レバーを押してスプレーします。
4. ノズルの先を鼻の外に出してから、レバーを緩めてください。

【使用上の注意】

- 耳鼻科咽喉科などで治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 初めて使用する際は洗浄液が噴霧するまでレバーを数回押してください。
- 上を向いて使用しないでください。[耳の内部に洗浄液が入り、中耳炎になる恐れがあります。]
- ノズルの先端を鼻の奥まで入れないでください。
- 本製品は鼻水や鼻詰まり等の症状を改善するものではありません。
- 使用中に万が一異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- ノズルの先を尖った物で突かないでください。
- スプレーした液体は強く吸い込まないでください。[洗浄液が気管支や肺に入る恐れがあります。]
- 鼻の中に入れてそのままレバーを緩めると、鼻水等が容器の中に逆流することがあります。
- 使用後は液が鼻から流れ落ちますので、ティッシュ等で拭いて清潔にしてください。
- 開封後は早めに使い切ってください。
- 洗浄後に強く鼻をかまないでください。
- 衣服などが液で濡れないようご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光や高温の場所を避け、涼しい所でキャップをして保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 使い終わった容器を廃棄する場合は、自治体のルールに従ってください。

【取扱い上の注意】

- 他の容器に入れ替えないでください。[誤用の原因になり品質が変わることがあります。]
- 他の人と共用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】製造販売業者名 シースター株式会社
電 話 03-4511-8855