

上手に吸うための

ゴックン



お客様サービスセンター
☎077-531-0770

(平日9時～18時 土日祝日除く)

🌀 シリコンノズルを深く
鼻の穴に入れましょう！



ぴったりと鼻の穴をふさぐ
ように奥まで入れてください。

※空気が入ると吸引力が下がります。


🌀 本体のお尻を持ち上げる
ようにしてみましょう！



シリコンノズルの向きが
顔と垂直になるように
しましょう。


※鼻腔内を傷つけないようやさしく動かしましょう。

🌀 左右に動かすなど角度や
向きを変えましょう！

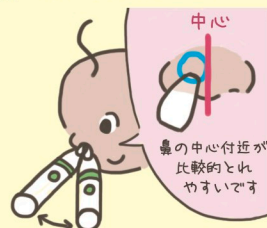

やさしく動かしながら
鼻水ポイントを探しましょう！

🌀 シリコンノズルで鼻の穴をふさいだまま **5秒** 吸引してみましょう！

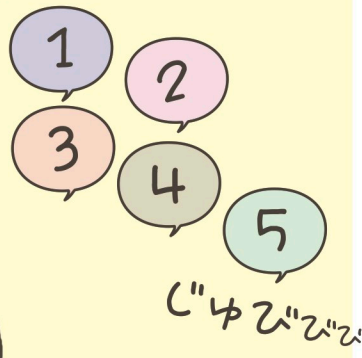

🌀 吸引しやすいタイミングで行いましょう！

●お風呂あがり



●スチームで鼻を温める



●温かい食べ物を食べた直後



故障かな？
吸引できないかな？



こんな時は
以下のことをお試しください。



☺ 機器の故障かどうか確認しましょう

シリコンノズルを外し、
電源を入れます。




吸引カップの吸引口を
腕の内側に押し当て
7秒程度そのままにします。



ウイーン

皮膚が引っ張られて
持ち上げればOK!

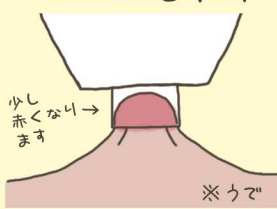

少し赤くなり→
ます

※うで

皮膚が持ち上がらず赤くならない方はこれらをチェック👁️してください。

チェック①


吸引カップは
しっかりと
はまっていますか？



セット
ポイントを
合わせて

凸部分

凹部分

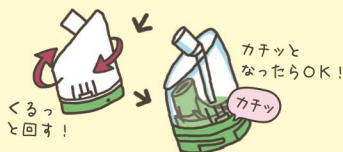

くるっ
と回す！

カチッと
なったらOK!

カチッ

チェック②

パッキンは
正しく装着されて
いますか？



× ねじれたり
してませんか？



○ 真っすぐ

パッキンは取り外しが
できるようになっています。
お手入れの際、なくさない様
注意しましょう。

吸引カップが
カタカタする時は
パッキンが入ってない
状態です。



こども用電動歯ブラシ “プチブル” レインボー

ピンク S-202P / ブルー S-202B

レインボーライトで赤ちゃんの興味をひき、
楽しく歯みがきができます。
明るい白色LEDで仕上げみがきもラクラク。



“音波振動式”

やわらかく傷つきやすい乳歯を、やさしい
音波振動と超柔らかソフトブラシで守ります。



スイッチ
1回

レインボーライトが点滅



スイッチ
2回

白色LEDライトの点灯と振動

¥1,980