

# 上手に吸うためのコツ Ver 3.0

シリコンノズルを  
鼻の穴に入れましょう!



隙間ができないように鼻の穴に  
しっかりと押し当ててください。

本体のお尻を持ち上げる  
ようにしてみましょう!



シリコンノズルの向きが顔と  
垂直になるようにしましょう。

左右に動かすなど角度や  
向きを変えましょう!



やさしく動かしながら  
鼻水ポイントを探しましょう!

\*空気が入ると吸引力が下がります。

\*鼻腔内を傷つけないよう、やさしく動かしましょう。

シリコンノズルで鼻の穴をふさいだまま  
5秒吸引してみましょう!



吸引しやすいタイミングで行いましょう!



お風呂あがり



スチームで  
鼻を温める



温かい食べ物を  
食べた直後

## ご利用上の注意(保証の対象外となります)

### ！防水ではありません！

スイッチ部、電池カバーから  
水分が入ると故障します。



### ！耐熱ではありません！

熱湯、煮沸、電子レンジ、食洗機での洗浄や  
消毒は行わないでください。変形の原因となります。




故障かな?

吸引できないかな? こんな時は以下のことをお試しください。

## 機器の故障かどうか確認しましょう


- ①シリコン/ズルを外し、電源を入れます。

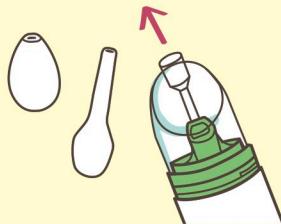

- ②吸引カップの吸引口を腕の内側に押し当て  
7秒程度そのままにします。



- ③皮膚が引っ張られて持ち上がるがればOK!

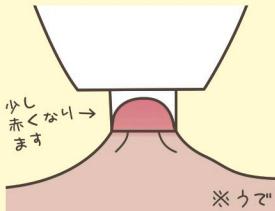

## 皮膚が持ち上がらず赤くならない方は、これらをチェックしてください。

### チェック1

- 吸引カップは『しっかり』はまっていますか?

カタカタする時は  
パッキンが装着  
されているか  
ご確認ください。



### チェック2

- パッキンは正しく装着されていますか?




\*パッキンは取り外しができるようになっています。  
お手入れの際、紛失しないよう注意しましょう。

### チェック3

- 適切な単三アルカリ乾電池を使用していますか?



○ 安価な乾電池  
× 極が電池カバーの金属に接触しない乾電池

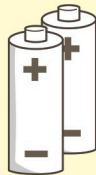

使い終わったら必ず、お手入れをしてください。

### 外部の洗浄


- キャップ
- 吸引ケース
- 吸引カップ(透明)
- シリコン/ズル
- ロングシリコン/ズル(別売)



本体から外し、中性洗剤で水洗いし、よく乾かします。

\*パッキンの紛失にお気をつけください。

### 内部の洗浄

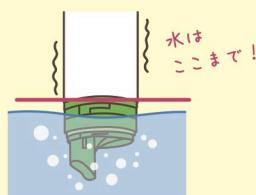

- ①容器に水をはり、吸引ケースを着けたまま水につけて、スイッチを入れます。

\*スイッチを入れたら7~8秒間洗います。



- ②水から引き上げ、水が出なくなるまで空運転します。



- ③吸引ケースを外し、本体に入った水をしっかり出してください。

\*本体と吸引ケースはよく乾かしてください。

お客様  
サービスセンター

03-4511-8855

(平日9~18時)※土日祝日・夏季および年末年始を除く



よくある  
お問い合わせは  
こちら