

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ (JMDNコード : 38749000)

シリコンノズル

**【形状・構造及び原理等】

(1) 形状・構造

本品は軟性の吸引管である。

接続口



(2) 原材料

シリコンゴム

(3) 原理

電動式吸引器などに接続して得られた陰圧によって、鼻腔内の鼻汁などを吸引する。

【使用目的又は効果】

治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節する。本品は汎用吸引チップで再使用可能である。

【使用方法等】

(1) 使用方法

- ① 使用前に必要なに応じて洗浄する。
- ② 本品の接続口に、電動式吸引器の吸引口を接続する。

** (2) 組み合わせて使用可能な医療機器

シースター株式会社が販売する一般的名称:電動式可搬型吸引器

販売名:ベビースマイル S-3XX

販売名:メルシーポット S-5XX

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品を鼻腔内に挿入する前に陰圧をかけると、本品の先端が周囲の粘膜に付着し吸引できないことがあるので注意すること。
- ・鼻汁の吸引以外の用途に使用しないこと。

**・吸引する際には、専用の併用医療機器に本品の接続口が確実に取り付けられていることを確認すること。

**【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
誤飲のおそれがあるため、乳幼児の手の届かない場所へ保管する。

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄、消毒の方法〉

- (1) 使用後はきれいな水を用いてよく通水洗浄する。
- (2) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した鼻汁などは直ちに洗浄する。
- (3) 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)などは、表面を損傷するので、使用を避けること。
- (4) 洗浄後は、衛生的な場所ですみやかに乾燥させる。

【包装】

**・2個 / 包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 : シースター株式会社

* 電話番号 : 03-6711-5500