
**BabySmile**®

LED ライト付き鼻水収集カップ **ひかる**君 S-415 かんたんガイド

# パーツが全部そろっているか確認しましょう



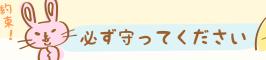

♠ LEDライトユニットは水洗いしないでください。



MAX 線

鼻水が MAX線を 超えないように してください。 メルシーポット・ シリコンノズルまたは ボンジュールと 組み合わせて使って ください。




### 組み立て方

① 外キャップに外パッキンを、 内キャップに内パッキンと 逆流防止キャップを取り付け ます。




3 内キャップが上にくるように 持ち、真ん中のくぼみに ひかる君フィルターを 1 つ 入れます。

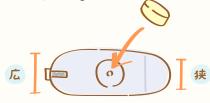

左右で幅が少し違うよ


③で囲んだ部分を合わせて、 LEDライトユニットを下に スライドさせます。

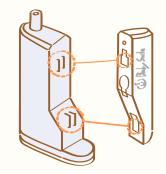

② 内キャップの開閉ボタンを 押しながら、カチッと言うまで 押し込みます。




4 内キャップの上に、外キャップ をセットして押し込みます。 時計回りに回して固定します。

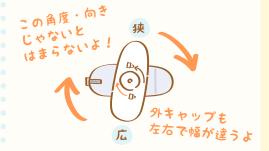




### メルシーポット・ノズルとの繋げ方

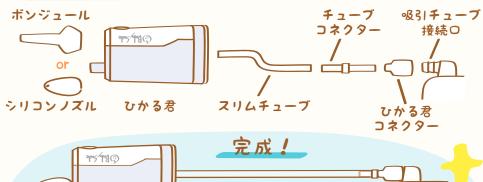



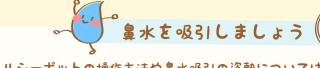


メルシーポットの操作方法や量水吸引の姿勢については、 メルシーポットの取扱説明書・かんたんガイドをご確認ください。 スリムチューブの内側に水を通す必要はありません。 LEDライトユニットを上に向けて持つようにしてください。

# 鼻水がMAX線までたまらないように、こまめに鼻水を捨てましょう。

LED ライトユニッ を外す



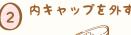



この向き!

### 量水がMAX線を超えてしまったら?

まずはメルシーポットの電源を OFFにしてください。

スリムチューブに皇水が入ってしまったら… → スリムチューブ・ひかる君コネクター・ チューブコネクターを洗ってください。

入っていなければ…

→ 汚れたパーツだけ洗ってください。




## 片付けをしましょう

### 取り外し方

- LEDライトユニットを上に スライドして外します。
- ひかる君フィルターを外し、 開閉ボタンを押しながら 内キャップを外します。 **鼻水収集カップから鼻水が** こぼれないよう、外すときは



外キャップを上にして、 外キャップを反時計回りに 回します。 図の角度まで回すと外せます。

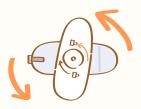


内キャップから逆流防止 キャップを外します。



### お手入れ

パッキンは

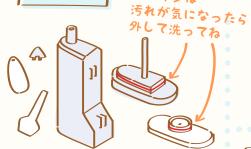

洗浄・消毒をして、よく乾燥 させたら、お子さまの手の 届かない清潔な場所に保管して ください。詳しくは取扱説明書 をご確認ください。



コネクター付きセットのパーツは、 汚れが気になったときだけ洗浄・ 消毒をしてください。詳しくは 取扱説明書をご確認ください。



LEDライトユニットは、 水濡れ厳禁です。絶対に 水洗いしないでください。

お子さまの手の届かない 清潔な場所に保管して ください。



メルシーポットの部品は、 汚れが気になったときだけ 洗浄・消毒をしてください。 詳しくはメルシーポットの 取扱説明書をご確認ください。 ※者沸消毒・スチーム除菌 NG



ひかる君フィルターは、 汚れが気になったら洗浄・ 消毒、へたりが気になったら 新しいものに取り替えて ください。(予備10個人り)

間違えて食べないでね おいしくないよ!

