



LEDライト付き鼻水収集カップ  
**ひかる君 S-415**  
 かんたんガイド

準備をしましょう

パーツが全部そろっているか確認しましょう

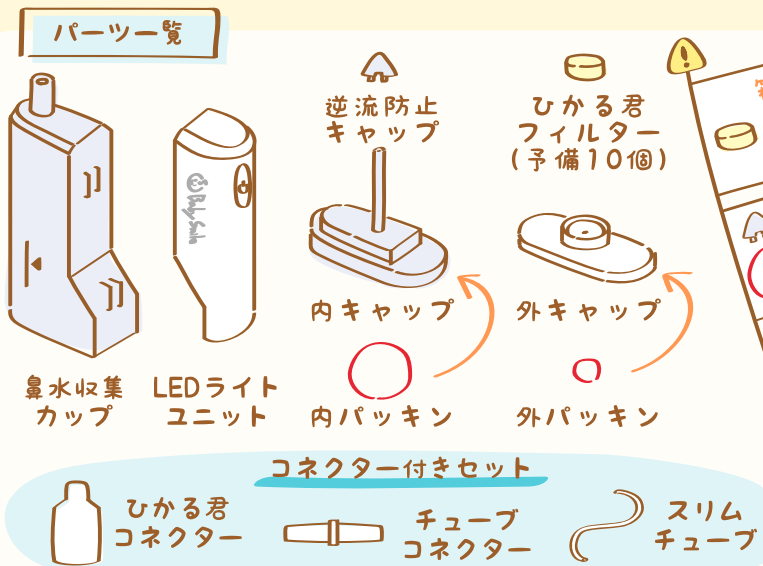

必ず守ってください

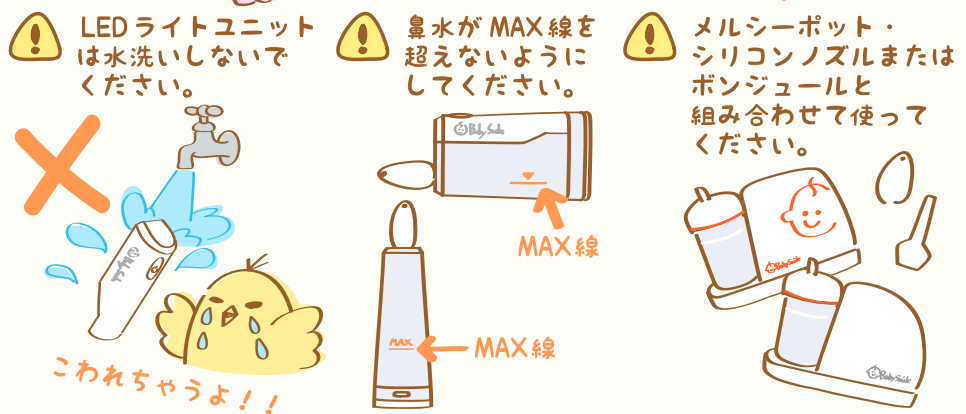


組み立て方

- ① 外キャップに外パッキンを、内キャップに内パッキンと逆流防止キャップを取り付けます。  
 しっかり押し込む  
 外 内  
 外 内  
 パッキン忘れないで...
- ② 内キャップの開閉ボタンを押しながら、カチッと言うまで押し込みます。  
 開閉ボタンを押しながら
- ③ 内キャップが上にくるように持ち、真ん中のくぼみにひかる君フィルターを1つ入れます。
- ④ 内キャップの上に、外キャップをセットして押し込みます。時計回りに回して固定します。  
 この角度・向きじゃないとハマらないよ!  
 狭 広  
 外キャップも左右で幅が違うよ
- ⑤ ④で囲んだ部分を合わせて、LEDライトユニットを下にスライドさせます。


完成!



## メルシーポット・ノズルとの繋げ方

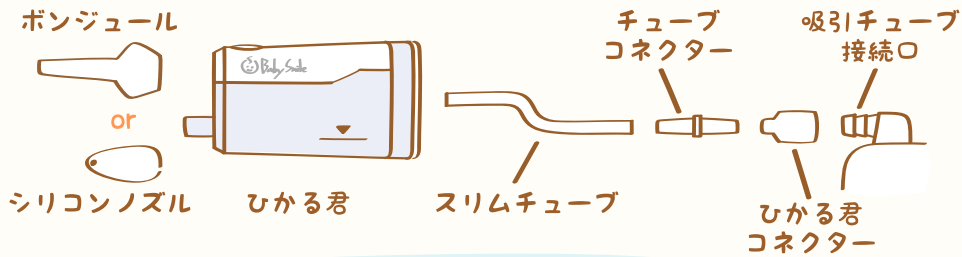

## 鼻水を吸引しましょう


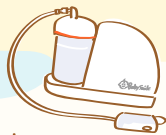


メルシーポットの操作方法や鼻水吸引の姿勢については、メルシーポットの取扱説明書・かんたんガイドをご確認ください。スリムチューブの内側に水を通す必要はありません。LEDライトユニットを上に向けて持つようにしてください。

吸うときはこの向き!

鼻水がMAX線までたまらないように、こまめに鼻水を捨てましょう。

- LEDライトユニットを外す
- 内キャップを外す
- 鼻水を捨てて水洗い

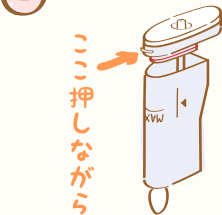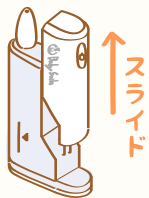

鼻水がMAX線を超えてしまったら?

まずはメルシーポットの電源をOFFにしてください。スリムチューブに鼻水が入ってしまったら... → スリムチューブ・ひかる君コネクター・チューブコネクターを洗ってください。入っていないければ... → 汚れたパーツだけ洗ってください。

メルシーポットは無事なの!?



## 片付けをしましょう

### 取り外し方

- LEDライトユニットを上スライドして外します。
- 外キャップを上にして、外キャップを反時計回りに回します。ⓐの角度まで回すと外せます。
- ひかる君フィルターを外し、開閉ボタンを押しながら内キャップを外します。鼻水収集カップから鼻水がこぼれないよう、外すときは向きに気をつけてください。


逆流防止キャップ飛ばしてない?




こぼしちゃった...



- 内キャップから逆流防止キャップを外します。

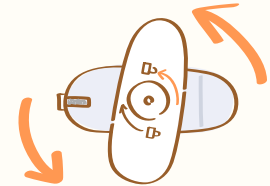

### お手入れ

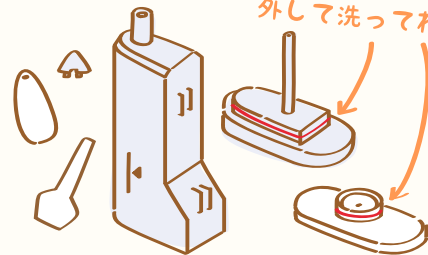

パッキンは汚れが気になったら外して洗ってね

洗浄・消毒をして、よく乾燥させたら、お子さまの手の届かない清潔な場所に保管してください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

LEDライトユニットは、水濡れ厳禁です。絶対に水洗いしないでください。

お子さまの手の届かない清潔な場所に保管してください。

メルシーポットの部品は、汚れが気になったときだけ洗浄・消毒をしてください。詳しくはメルシーポットの取扱説明書をご確認ください。※煮沸消毒・スチーム除菌NG

ひかる君フィルターは、汚れが気になったら洗浄・消毒、へたりが気になったら新しいものに取り替えてください。(予備10個入り)

コネクター付きセットのパーツは、汚れが気になったときだけ洗浄・消毒をしてください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

間違えて食べないでね! おいしいよ!

