

LEDライト付鼻水収集カップ ひかる君 S-415

【警告】


組み合わせて使用可能な医療機器を含む全ての部品を組み立てた後、電源オンしてください。
[けがのおそれがあります]

【禁忌・禁止】

1. 組み合わせて使用可能な医療機器に記載されている以外の機器に使用しないでください。
[けがのおそれがあります]
2. 吸引物をMAX線より上に溜めないでください。
[故障のおそれがあります]

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状・構造

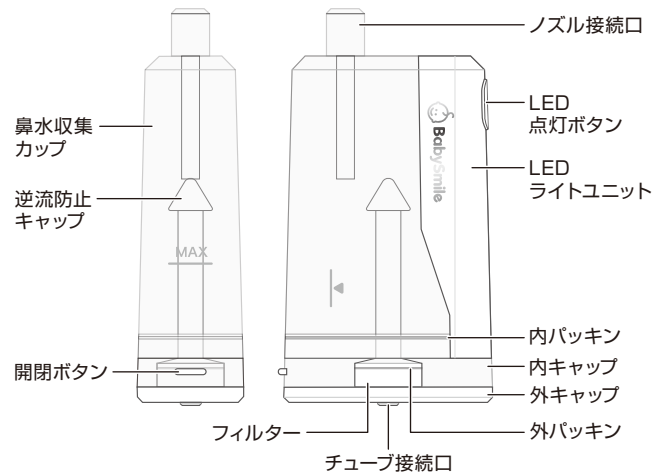

(2) 原材料

PC・PU・シリコン・ステンレス

(3) 原理

電動式吸引器などに接続して得られた陰圧によって吸引された鼻水などを本品に貯留する。

(4) 仕様

寸法 : 約W24mm×D47mm×H89mm
質量 : 約33g (コネクター含まず)
定格電圧 : DC 3.0V (LR43 アルカリボタン電池2個)
使用環境温湿度 : 5～35℃ <80%RH (結露なきこと)
保管輸送環境温湿度 : -10～50℃ <80%RH (結露なきこと)

【使用目的又は効果】

本品はプラスチック製で、ふたによって密閉でき、鼻水等の回収のために吸引器とともに使用し、吸引した鼻水等を貯留する用具である。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

(1) 使用方法

- ①チューブ接続口に、併用医療機器の吸引チューブを差し込む。必要に応じて、チューブ径を調整するためのひかる君コネクターを取り付ける。
- ②ノズル接続口にシリコンノズルを取り付ける。
- ③併用医療機器の部品を全て組み立て確認後、併用医療機器の使用 방법에従い、電源オンし、鼻水を吸引する。
- ④必要に応じて、LED点灯ボタンを押すと、押している間のみLEDが点灯する。

スリムチューブを使用する場合

- ①チューブ接続口にスリムチューブを挿し込み、スリムチューブの反対側にチューブコネクターとひかる君コネクターを接続する。
- ②併用医療機器の吸引チューブ接続口に、組み立てた①のひかる君コネクター側を接続する

(2) 組み合わせて使用可能な医療機器

シースター株式会社が販売する一般的名称：

電動式可搬型吸引器

販売名：

メルシーポットS-501・S-502・S-503・S-504 (スリムチューブ、チューブコネクター、ひかる君コネクター必要)

シースター株式会社が販売する一般的名称：

再使用可能な汎用吸引チップ

販売名 シリコンノズルS-402・ポンジュールS-401

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

組み合わせて使用可能な医療機器を含む全ての部品を組み立てた後、電源オンすること。

LEDライトユニットを水洗いしないこと。

【保管方法及び耐用期間等】

〈保管方法〉

清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。

誤飲のおそれがあるため、乳幼児の手の届かない場所へ保管する。

〈耐用期間〉

1年 (自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄、消毒の方法〉

- ①使用後は直ちに中性洗剤で洗浄し、しっかりすすぐ。
- ②洗浄後は衛生的な場所ですみやかに乾燥させる。
- ③必要に応じ、アルコールや薬液、スチーム除菌により消毒する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：シースター株式会社

電話番号：03-6711-5500