

永 久 保 存 版

# かんたんガイド

メルシーポット


MerciPot S-504





# まずは準備をしましょう

## 用意するもの

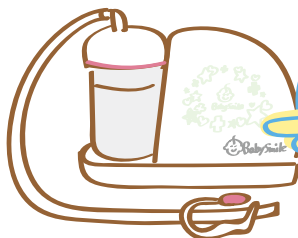

メルシーポット S-504

まず  
これと...



じー



水 (30~50cc)

## 吸引器の準備



シリコンノズルのつなぎ方



チューブストッパー & チューブ  
(ベビちゃんクリップ)



コネクター



できたー!



シリコンノズル



ご注意

ガラス製のオリーブ管は、破裂・破損による  
ケガの恐れがあります。鼻水吸引には、  
安全なシリコンノズルをお使いください。



ベビちゃん  
クリップの方と  
つなげてね

ギザギザの方を  
チューブに  
さしてね

いたー



ノ  
ズ  
ル



# 鼻水を吸引する前に…

## はじめてお子さまの吸引をするときは

まずご自身で吸引してみましょう。  
次ページでの吸引方法に従って挿入方法  
と吸引の練習をしてください。  
自分自身で体験し、感覚をつかむことが  
大切です。また、その姿をお子さまが見て  
安心してくれます。



※びっくりさせてはいけません。

### ！ ご注意

感染予防のため、ノズルは1人につき1個ご用意ください。

うまくなつてから見せてあげてね



## 鼻水吸引の姿勢

### 幼児の場合



or



向かい合って座り  
片手でお子さまの  
後頭部を支え固定  
します。

ママが足をのばして  
座り、寝かせたお子  
さまの頭をはさんで  
固定します。お子さ  
まの腕はママの太も  
もの下で固定します。

### 乳児の場合



or



ほ乳瓶でミルクを  
飲ませる時のよう  
に頭を固定しなが  
ら抱きかかえます。


ママが足をのばして  
座り、寝かせたお子  
さまの頭をはさんで  
固定します。お子さ  
まの腕はママの太も  
もの下で固定します。





# 鼻水を吸引しましょう

1 スイッチを入れます。

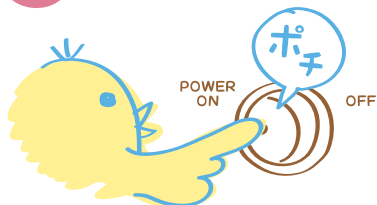

※本体の背面にスイッチがあります。

2 水を 10～20cc 程度 吸引します。




チューブの内側を  
軽く濡らせばOK

※吸引チューブ内に鼻水が  
こびりつくのを予防します。


3 シリコンノズルを鼻に挿入し、鼻水を吸引します。



まず、小鼻の横をひっぱって、  
鼻の穴を広げます。

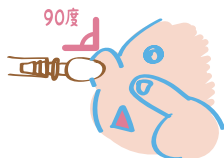

シリコンノズルを顔に対して  
90度になるように挿しこみます。

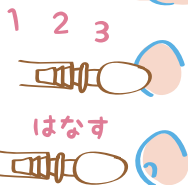

3～4 秒程度の吸引を  
何回かに分けて行います。

吸い過ぎ  
注意!



- ※ 5 秒以上続けて吸引しないでください。
- ※ 鼻の粘膜を傷つけないようやさしく挿しこんでください。
- ※ お子さまの様子をよく観察しながら、  
痛がったり鼻血がでるような時は吸引を中止してください。



吸引していない方の鼻は、絶対に塞がないでください。  
両方の鼻が塞がった状態で吸引すると耳に負担がかかります。


# 鼻水吸引のコツ

POINT

1

『鼻水ポイント』を狙ってシリコンノズルを向けるようにしましょう。

小鼻の上に  
『鼻水ポイント』  
があるよ。

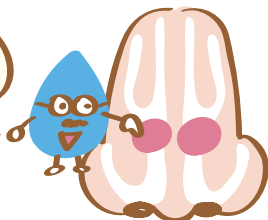

鼻の中は  
こんな風に  
デコボコ  
しているよ。

POINT

2

すっきり吸引できるタイミングで  
吸引しましょう。



お風呂あがり



スチームで  
鼻を温める



温かい食べ物を  
食べた直後



※鼻腔があたたまって湿ってくるので吸引しやすくなります！




## しっこいネバネバ鼻水に




ベビちゃんクリップを使って手元でらくらく操作！  
ネバネバの鼻水も簡単に吸引できます。



ベビちゃんクリップを  
5秒ほど指で押さえます。

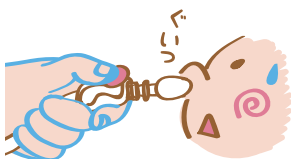

そのまま鼻の穴に  
シリコンノズルを入れます。

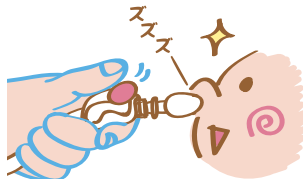

指を離すと、すっきり鼻水を  
吸引することができます。





# 鼻水の吸引が終わったら

- 1 水を 20～30cc 吸引しスイッチを切ります。



※吸引チューブ内の鼻水を吸引ボトルへ移動させ、きれいにするためです。



お手入れの最後に  
アルコール消毒剤を  
外したチューブに通すと  
かんたんに消毒できま  
早く乾くよ！

- 2 後片付けをしましょう。



に従って洗浄し、よく乾燥させます。

最低でも 1 日に 1 度はしっかり洗浄しましょう。

説明書？！



え？  
なくしたの？



※説明書は大事に保管しましょう。

シリコンノズルと  
ノズルコネクタは  
毎回洗浄してください。




※必ずよく乾燥させてから保管して  
ください。濡れたまま使用すると  
故障の原因となります。

## 暗い場所でかわいいイラストが光ります

本体に 1 時間程度光を当てると、約 20～40 分間イラストが光ります。

※発光時間や明るさは、蓄積された光の量などにより変わります。

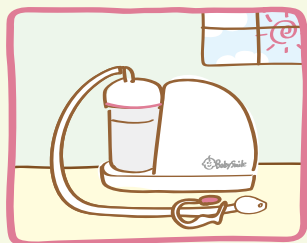

光をたくさん  
当てることが  
ポイント！

本体のトラブルを防ぐために  
**必ず守ってください**



食器洗い機での洗浄および煮沸消毒や乾燥は絶対にしないでください。

熱により変形するおそれがありますので、  
食器洗い機での洗浄および煮沸、  
電子レンジでの消毒・乾燥はしないでください。  
※洗浄や消毒、お手入れについて詳しくは  
取扱説明書をご覧ください。



ボトルを本体と接続した状態で回転させないでください。

ボトル内の吸引物や水が本体に入り、  
故障の原因となります。



本製品を横に倒したりしないでください。

ボトル内の吸引物や水が本体に入り、  
故障の原因となります。





こちらをお読みください



- 

## ボトル部分のチェック

- 

- 
- The diagram illustrates the conversion of the fraction  $\frac{1}{2}$  to the decimal  $0.5$ . On the left, a cup is shown with a horizontal line at the halfway mark, labeled  $\frac{1}{2}$ . Below it, a number line is shown with a tick mark at  $0.5$ . An arrow points to the right, where the same cup is shown with a horizontal line at the halfway mark, labeled  $0.5$ . Below it, the same number line is shown with a tick mark at  $0.5$ .





## 最終チェック

※水を吸引する際はMAXラインを超えないようにご注意ください！

- 1 吸引チューブ、ノズルコネクター、シリコンノズルをしっかりとつないでください。
- 2 別の容器に約100ccの水をご用意ください。
- 3 約4〜5秒ですべての水を吸引できれば吸引力に問題はありません。



### Check1



## ポンプが作動している音は聞こえますか？

ポンプの作動音が全く聞こえない時はACアダプターの断線が考えられます。  
ACアダプターを新しいものにお取り替えください。  
※別途ACアダプターの購入が必要です。

### Check2



## フロートが上にあがっていませんか？

フロートが上にあがっていると、上部をふさいで、吸引できなくなることがあります。水分が残っているときに起こりやすい現象なので、よく乾燥させてから使いましょう。

O X



ちよつと  
ぐらいい  
めれてても  
いいかと...



### Check3



## 部品は全部そろっていますか？

付属部品が全部そろっているか確認してください。  
特に、ボトルパッキン、ボトルカバー接続口用Oリング2本などの  
付け忘れがあると空気が漏れて吸引できないことがあります。

もしや...  
ミニのゴム  
のこと？



### Check4





## 各部品の接続はきちんとできていますか？

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

## 鼻水吸引についての

# Q & A

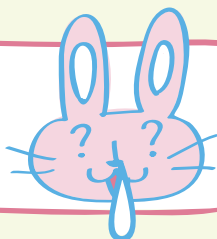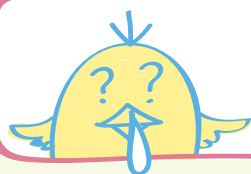


Q

耳に悪くないですか？

A

もう一方の鼻の穴をふさがないようにして吸引をすれば、影響はありません。ただし、両方の鼻が完全につまっている場合には、長く吸引し続けると耳へ負担がかかります。短時間（3～4秒程度）の吸引を何回も繰り返し、左右交互に少しずつ吸引しましょう。

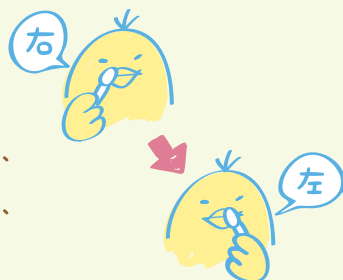

Q

一日に何度も吸って良いの？

A

朝起きた時や、お風呂の後、寝る前など、何度でもこまめに吸ってあげましょう。



Q

鼻水を吸引してはいけない時がありますか？

A

鼻の粘膜が炎症を起こして充血していたり、腫れや傷がある時は使用しないでください。また、鼻血の後には使用しないでください。



Q

鼻水吸引すると何が良いの？


A

赤ちゃんは自分で鼻をかむことができません。メルシーポットならネバネバの鼻水もすっきり吸引できて、呼吸が楽になります。また、のどに流れたり耳に流れるなども防ぐことができます。



**Q** 吸引力を弱めたい時はどうすればよいですか？

**A** シリコンノズルで鼻の穴をぴったりふさぐと吸引圧が上がりますが、ふさぐのをやめると吸引圧はすぐに下がります。手元で細かくノズルを動かし、吸引圧を調整してください。

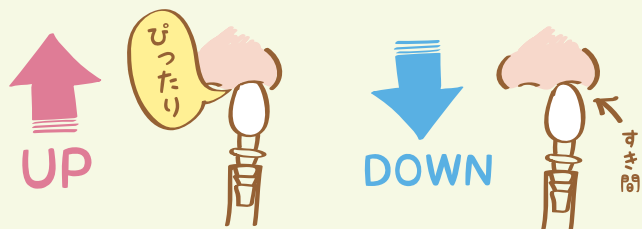

**Q** 大人も使えますか？

**A** ママやパパ、大人の方も一緒にお使いいただけます。  
※感染予防のため、シリコンノズルは人数分をご用意ください。




**Q** チューブが長すぎるので切ってもよいですか？

**A** 吸引力に影響はありませんので、お好みの長さに切ってお使いください。



**Q** ベビちゃんクリップを使わなくても吸えますか？

**A** メルシーポット S-504 は鼻水吸引に最適な吸引力に設定されていますので、クリップを使わなくてもしっかり鼻水を吸引できます。

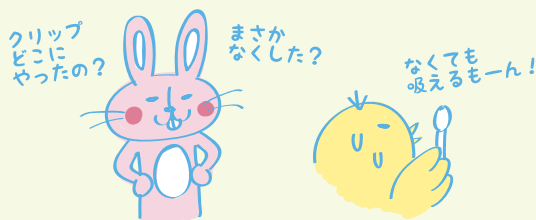



メルシーボットS-504の  
使い方の動画や詳しい情報はこちら

[www.seastar.co.jp/products/mercipot.html](http://www.seastar.co.jp/products/mercipot.html)



部品・  
別売品はこちら



ベビースマイル

検索



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

お客様サービスセンター

**☎ 03-4511-8855**

(平日9:00～18:00まで土日祝日を除く)