

機械器具 16 体温計

管理医療機器 皮膚赤外線体温計 (JMDNコード:17888000)

ベビースマイル DECO S-704**【警告】**


- 測定結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。

【禁忌・禁止】

- 検温部を汚さないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構造図

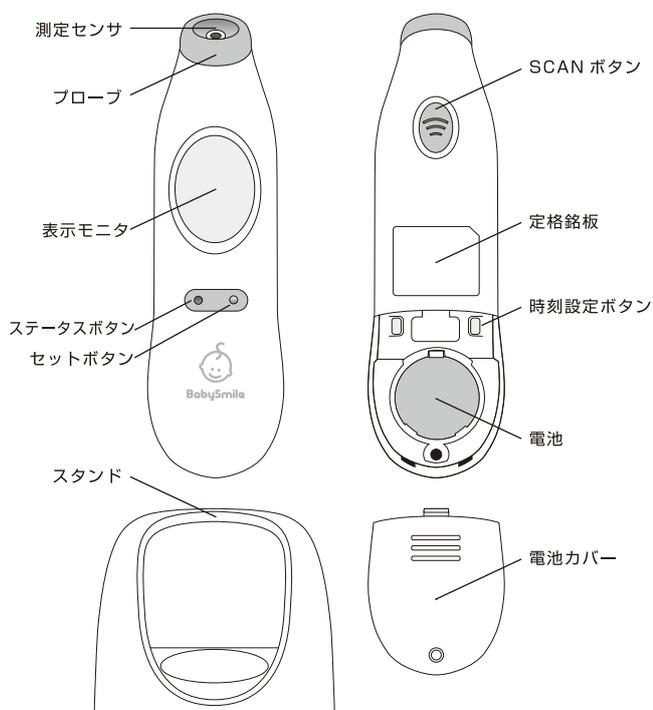

2. 寸法及び重量

寸法：長さ11.4cm×幅3.2cm×厚み2.1cm

重量：34g（電池含む）

3. 電氣的定格

電源：リチウム電池CR2032

電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器

電撃に対する保護の程度による分類：BF形装着部

4. 作動原理

人体の皮膚表面から放射された赤外線を測定部であるプローブに内蔵したセンサにて検出する。センサにより得られた検出信号を内部演算回路にて温度値に変換し、液晶ディスプレイにデジタル表示する。

5. 電磁両立性

本品はEN60601-1-2:2007に適合している。

6. 性能

測定部位	皮膚表面
測定方式	赤外線式
測定範囲	32.0°C ~ 42.9°C
最大許容誤差	±0.2°C (35.5°C ~ 42.0°C) ±0.3°C (32.0°C ~ 35.4°C) ±0.3°C (42.1°C ~ 42.9°C)
測定範囲外告知	測定結果が42.9°Cより大きい時に“Hi”を表示 測定結果が32.0°Cより小さい時に“Lo”を表示
体温表示	デジタル表示3桁
最小表示単位	0.1°C
使用環境温湿度	10.0°C ~ 40.0°C、80%RH以下（結露無きこと）
保管環境温湿度	-25.0°C ~ 55.0°C、95%RH以下（結露無きこと）
測定値記録機能	9回分の測定結果を記録

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

<使用前の準備>

1. 電池カバーを指で押し開け、取り外す。
 2. SCAN ボタン、ステータスボタン、またはセットボタンを押し、電源を投入する。
 3. 時刻設定ボタンを押下し、現在の時間、分を順に選択する。
 4. 時刻選択後、セットボタンで時刻を設定する。
- ※時刻設定後、体温計を使用していない時は、時刻と室温が交互に表示される。

<使用>

1. 外観点検（本体の外観に汚れ、破損がないこと等の確認）を行う。
2. SCAN ボタン、ステータスボタン、またはセットボタンを押し、電源を投入する。
3. プローブを額にあて、SCAN ボタンを1秒押す。
4. ビープ音とともに表示モニタに検温結果が表示される。

<使用后>

1. 本体を清潔な布で清掃する。

<洗浄、清掃および消毒>

1. 消毒用アルコールを染み込ませた脱脂綿などで、測定センサ部を丁寧に拭く。
2. 本体の汚れは、清潔な乾いた布で拭きとる。
3. お手入れ後は乾燥した涼しい場所で、ほこりや直射日光を避けて保管する。

【使用上の注意】

1. 取扱説明書をよく読み、十分に理解した上でご使用ください。
2. 周囲温度により、ある程度の測定誤差を生じることがあります。できるだけ同じ場所など、一定の測定環境下でご使用ください。
3. 体温測定をする30分前には、患者のいる同室に体温計を置き、周囲温度に慣らしてください。
4. 分解・修理・改造および調整は行わないでください。
5. 指定以外の電池を使用しないでください
6. 検温部には触れないでください。
7. プロローブは常に清潔な状態で使用してください。
8. 子供だけで使用させないでください。
9. 高いところから落下させる等の強い衝撃を与えないでください。
10. 本体を水などの液体に浸したり、水蒸気での消毒を行わないでください。
11. 保管環境温湿度以外の雰囲気内で保管しないでください。
12. 本体を煮沸消毒しないでください。
13. ベンジン、シンナー等の溶剤で洗浄しないでください。
14. テレビ、電子レンジ、携帯電話に近づけないでください。
15. 運動、入浴および食事などの後は、30分以上経過してから測定してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 室温 -25.0℃～ +55.0℃、95% RH以内の範囲で、極度の湿気や直射日光を避け、保管する。
2. 乳幼児の手の届くところには保管しないでください。
3. 耐用期間 : 3年 [自己認証 (当社データによる)]

【保守・点検に係る事項】

1. 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
2. 取り外した電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。
3. 使用後の電池は廃棄物処理法に従って廃棄してください。

【包装】

1台/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名	シースター株式会社
住 所	東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川
電 話	03-6711-5500
製造業者名 (国名)	Famidoc Technology Co., Ltd. (中華人民共和国)