

故障かな?と思ったら

表示画面に以下のマークが表示されていないかご確認ください。

EE	システムが正常に作動していません。	電池を取り外し、1分間待ってください。その後電池を入れ直し、電源を入れてください。
EI	周囲の温度が使用温度範囲外です。	15℃～40℃の部屋に30分程度置いてください。
Lo	温度が表示温度範囲未満です。	体温計モードの表示温度範囲は34.0～42.2℃です。
Hi	温度が表示温度範囲を超えています。	体温計モードの表示温度範囲は0～99.9℃です。

うまく測れない場合は以下の点をご確認ください。

- ・同じ時間、同じ環境で使用していますか？
- ・測定部から離しすぎていませんか？また、測定センサと平行になっていますか？
- ・ビッと音がなり終わる前に動かしたりしていませんか？
- ・汗やファンデーション、髪の毛など、障害物はありませんか？
- ・扇風機や、エアコンなど風や熱気の当たる場所で測定していませんか？

※詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。

Q. 脇で測る体温と温度が違いますが…

本製品はこめかみの温度を、人間の体内温度に近い舌下体温に補正して表示します。一般的な脇で測る体温計の温度と比べ、舌下体温は0.2℃程高くなり、温度差が生じる場合があります。(個人差があります)

Q. うまく測れない! 体温が低すぎる!!

体温が著しく低く測定される、温度に誤差を感じた場合は、少しずつ場所をずらしながら2、3回測定して、もっとも高い数値を測定温度としてください。

Q. 体温計なのに、ミルクの温度も測れるの?

はい。温度計モードは物や室温などの温度を測ることができます。物の場合は内部の温度ではなく、表面の温度を計測しますので、ミルクや離乳食、お風呂などの温度は測定の直前に良くかき混ぜてください。

その他何かご不明点などございましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先: 03-4511-8855 (平日 9:00～18:00 土日祝を除く)

161006.2

ベビースマイル Pit

S-705

非接触式体温計

かんたん操作ガイド

ベビースマイル Pit は、こめかみで体温を測定します。



なぜこめかみで測るの?

理想的な体温測定は、体の中心部の温度を測定することです。体温は、体の中心に近ければ近いほど、体の外の環境に影響されにくく正確な数値が測定できます。

「こめかみ」は、体の中心部の温度を反映する動脈が多いため、体温測定に適していると言われています。

どうやって測定しているの?

ベビースマイル Pit は、動脈から出ている赤外線を測定センサで感知し、舌下体温に変換して測定しています。


※動脈を感知しない場合、実際より体温が低く測定される場合があります。

触れずにピッと
約 1 秒



🌡️ 体温の測り方

- ① 本体裏面の電源ボタンを押します。

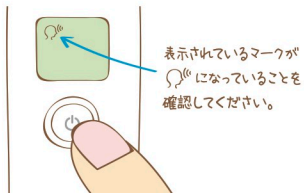

- ② 本体をこめかみにかざし、
START ボタンを押してください。



❌ NG


前髪の~~上~~から

汗などの水分で濡れている



🌡️ 温度の測り方

- ① 本体裏面の電源ボタンを押します。

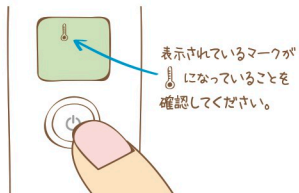

- ② 本体を測定したい物にかざし、
START ボタンを押してください。



⚠️ 注意

プラスチック製品などの温度が伝わりにくい
容器をお使いの場合は容器の側面からでなく、
上から中身に直接かざすようにしてください。



電源 ON/OFF

本体裏面の電源ボタン🔌を押すと電源が入ります。
3秒ほど長押しすると電源が切れます。



メモリー機能について

電源が入った状態で、電源ボタン🔌を押すと
過去9回の測定結果を確認することができます。




🌡️ 測定モード切替方法


- ① 電源がオフになっている状態で、
START ボタンを8秒間押し続けます。



- ② START ボタンを押し続けると、表示モニターに
体温計モードと温度計モードのアイコンが
交互に表示されます。

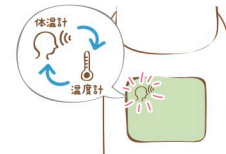

- ③ 使用したいモードのアイコンが表示された
時に、START ボタンを離してください。

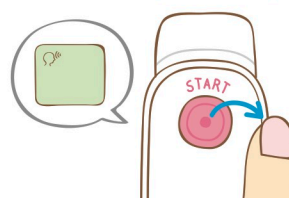

- ④ 指を離れた後に、ピーピッと音がなったら
設定完了です。



⚠️ 測定の際はご注意ください。

本体と測りたい物の
距離は5cm以内
になるようにしてください。



本体測定センサと測
りたい物が平行にな
るようにしてください。

平行



⚠️ 注意

- ・ 温度計モードでは内部の温度ではなく、表面の温度を測定します。
ミルクや離乳食、お風呂などの温度は測定の直前によくかき混ぜてください。
- ・ 周囲温度により、測定結果に誤差が生じる場合があります。体温の変化を測定したい場合は
できるだけ同じ環境でご使用ください。(連続して測定する際は10秒間隔をあけてください。)
- ・ 防水仕様ではございませんので、本体に水などの液体がからまないようにしてください。
浴室など湿気の多い場所で使用した際は、速やかにその場から離し、室温で保管してください。