

故障かな?と思ったら

表示画面に以下のマークが表示されていないかご確認ください。

Er 1	測定準備ができていません。	連続で測る場合、ピープ音が2回鳴り、マークが点滅しなくなってから測定してください。
Er 5 Er 9	システムが正常に作動していません。	電池を取り外し、1分間待ってください。その後電池を入れ直し、電源を入れてください。
Er 3	周囲の温度が使用温度範囲外です。	10℃～40℃の部屋に30分程度置いてください。
Lo	温度が表示温度範囲未満です。	体温計モードの表示温度範囲は34.0～42.2℃です。
Hi	温度が表示温度範囲を超えています。	温度計モードの表示温度範囲は-22.0～80.0℃です。

うまく測れない場合は以下の点をご確認ください。

- ・同じ時間、同じ環境で使用していますか？
- ・測定部から離しすぎていませんか？また、測定センサと垂直になっていますか？
- ・ピッ音がなり終わる前に動かしたりしていませんか？
- ・汗や髪の毛など、障害物はありませんか？
- ・扇風機や、エアコンなど風や熱気の当たる場所で測定していませんか？

※詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。

Q. 脳で測る体温と温度が違うんですが…

本製品はおでこの温度を、人間の体内温度に近い舌下体温に補正して表示します。一般的な脳で測る体温計の温度と比べ、舌下体温は0.2℃程高くなり、温度差が生じる場合があります。(個人差があります)

Q. 体温がうまく測れず、低く表示されます。

体温が著しく低く測定される、温度に誤差を感じた場合は、少しずつ場所をずらしながら2、3回測定して、もっとも高い数値を測定温度としてください。
また、計測部が冷えている場合は、計測部を20分程室温に慣らしてください。

Q. 体温計なのに、ミルクの温度も測れるの？

はい。温度計モードは物や室温などの温度を測ることができます。
物の場合は内部の温度ではなく、表面の温度を計測しますので、ミルクや離乳食、お風呂などの温度は測定の直前に良くかき混ぜてください。

その他何かご不明点などございましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先：03-4511-8855 (平日 9:00～18:00 土日祝を除く)


171122.2

ベビースマイル Pit

非接触式体温計 S-706

かんたん操作ガイド

ベビースマイル Pit は、
おでこで体温を測ります。

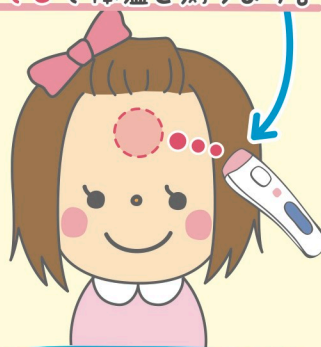

なぜおでこで測るの？

理想的な体温測定は、体の中心部の温度を測定することです。
体温は、体の中心に近ければ近いほど、
体の外の環境に影響されにくく、正確な数値が測定できます。

「おでこ」は、体の中心部の温度を反映する特性があるため、体温測定に適しているといわれています。

どうやって測っているの？

ベビースマイル Pit は、皮膚から出ている赤外線を測定センサで感知し、舌下体温に変換して測定しています。

※皮膚表面が冷えている場合、実際より体温が低く測定される場合があります。


おでこにかざして

約 **0.1** 秒


※センサ測定時間



体温の測り方

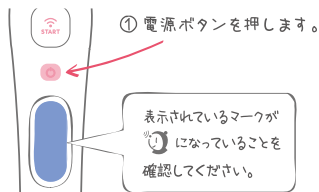


- ② 本体を**おでこ**にかざし、
START ボタンを押してください。

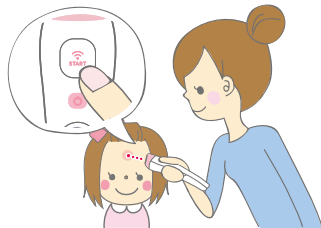


NG

前髪の上から 汗などの水分で濡れている

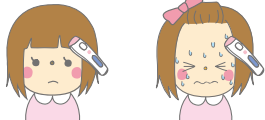

⚠ 測定の際はご注意ください。

体温計と測りたい物の
距離は**4cm以内**に
なるようにしてください。

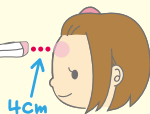

温度の測り方



- ② 本体を測定したい物にかざし、
START ボタンを押してください。




測定したいものの液体の場合、
よくかき混ぜてから、測定してください。

⚠ 注意

プラスチック製品などの
温度が伝わりにくい
容器をお使いの場合は
容器の側面からでなく、
上から中身に直接かざす
ようにしてください。




体温計と測りたい物
が**垂直**になるように
してください。

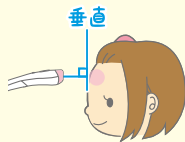


電源 ON/OFF

電源ボタンを押すと電源が入ります。7秒ほど長押し、
もしくは60秒放置すると電源が切れます。

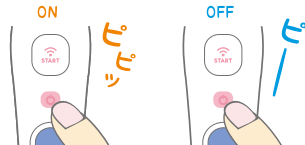


メモリー機能について

電源が入った状態で、電源ボタンを押すと
メモリー表示モードのマークが表示され、
過去25回の測定結果を確認することができます。

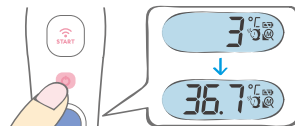


測定モード切替方法

- ① 電源がオンになっている状態で、
電源ボタンを押しながら
START ボタンを押します。

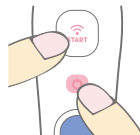

- ② START ボタンを押すごとに、体温計モードと
温度計モードを交互に設定できます。
※温度計モードの場合、計測音/アラームは鳴りません。

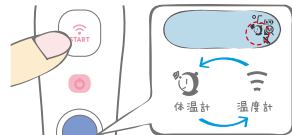


サイレントモード切替方法

- ① 電源がオンになっている状態で、
電源ボタンを3秒ほど長押しします。



- ② サイレントモードのマークが表示され、
指を離せば設定完了です。
※サイレントモードの場合、発熱アラームは鳴りません。

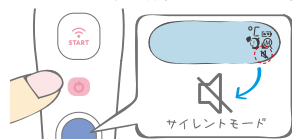

⚠ 注意

- 温度計モードでは内部の温度ではなく、表面の温度を測定します。
ミルクや離乳食、お風呂などの温度は測定の前によくかき混ぜてください。
- 周囲温度により、測定結果に誤差が生じる場合があります。体温の変化を測定したい場合は
できるだけ同じ環境でご使用ください。(連続して測定する際はビープ音が2回なるまで待ってください)
- 防水仕様ではございませんので、本体に水などの液体がかからないようにしてください。
浴室など湿気の多い場所で使用した際は、速やかにその場から離し、室温で保管してください。