


# シースター 体温計シリーズ

## 専用アプリケーション 「体温くん」

データ通信ガイド Ver.3.0

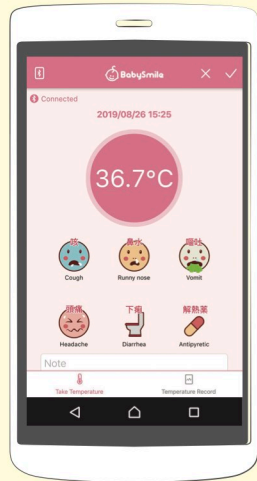

・Apple、Appleロゴ、iPad、iPhone、iPod touchは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。Apple StoreはApple Inc.のサービスマークです。  
 ・Android およびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。  
 ・Bluetooth® ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、これらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および上記以外の登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

## 体温を記録する

- Bluetooth 機能と位置情報を ON にした状態で、アプリを起動し、体温計の電源を入れて体温を測定します。
- 画面に測定数値が表示されます。同時にアイコンをタップすることで、体調や解熱薬の投与を記録できます。

### アイコンの意味




Note・・・×モ欄

- 画面右上の「✓」をタップすると体温や体調が記録されます。「×」でキャンセルされます。



- 記録した体温は画面下部の「Temperature Record」アイコンからグラフ・リストを確認できます。

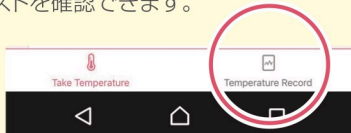

## アプリをインストールする

- スマートフォンを用意してください。  
※タブレット端末には対応していません。

対応OS  
 ・iOS10.0以降 (iPhone5以降)  
 ・Android5.0以降

- Apple StoreまたはGoogle Playストアから、専用アプリ「体温くん」をダウンロードし、インストールしてください。(無償)



Apple Store



Google Playストア

## 通信を行う

- スマートフォンの Bluetooth 機能と位置情報を ON にしてください。
- 専用アプリ「体温くん」のアイコンをタップし、起動します。
- Bluetooth 機能と位置情報を ON にした状態で体温計の電源を入れると、体温計とスマートフォンの通信が始まります。
- 画面左上のBluetoothアイコンをタップして、「Connected」と表示されたら通信ができる状態です。




▲「体温くん」アイコン



## 記録を見る / 編集する

- 「Temperature Record」画面のリスト表示かグラフ上の点をタップすると、記録した体温を閲覧できます。
- 閲覧画面の右上の編集ボタン「✎」から、アイコン編集や記録の削除を行う事ができます。

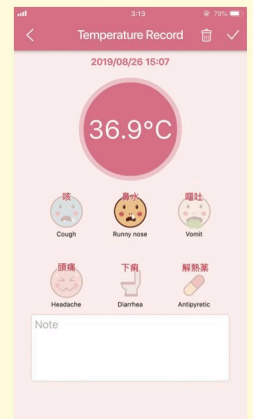

### ⚠️ 注意

- お使いになる端末の種類やバージョンにより、画面の構成や表示が当ガイドと異なる場合があります。
- その他操作、詳細については、下記URLより操作説明書をご参照ください。

<https://www.seastar.co.jp/products/babysmile/babysmile-pit-app.html>

