


取扱説明書

2025年3月5日



虫さされヒーラー S-937

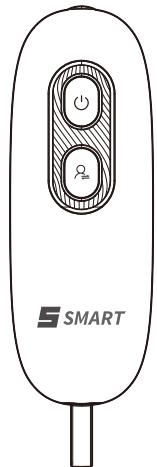

この度は、本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、適切にご使用ください。
取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意 <お使いになる前によくお読みください>

<警告>


- ・糖尿病の方は使用しないでください。
▶ 痛みに対する感度が低下し、やけどをする可能性があります。
- ・身体の不自由な方、3歳未満のお子様、熱に対する感度の鈍い方は使用しないでください。
▶ やけどをする可能性があります。
- ・急性または慢性の疾患（障害または炎症）のある皮膚、発疹（アレルギーなど）、やけど、凍傷、打撲、皮膚疾患による腫れのある患部には使用しないでください。
▶ 症状の悪化の原因になります。
- ・お子様の手の届くところに本製品を放置・保管しないでください。
▶ 予期せぬけがの原因になります。
- ・目の周囲、口、粘膜等皮膚の敏感な部分や、湿った肌には使用しないでください。
▶ 予期せぬけがの原因になります。
- ・発熱時は使用しないでください。
▶ 正しい効果を得られない可能性があります。
- ・ローション、クリーム、ジェル等化粧品や医薬品を塗布している部位には使用しないでください。
▶ 正しい効果を得られない可能性があります。

- ・痛みを伴う場合は直ちに使用を中止してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けた場所に保管してください。

<注意>

- ・本製品は医師の診察や治療に代わるものではありません。本製品を使用しても症状が改善されない場合は使用を中止してください。本製品の使用中または使用後に症状が悪化した場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- ・濡れた手で本製品に触れないでください。
▶ 予期せぬけがの原因になります。
- ・本製品を落下させたり、上に重いものを置いたりしないでください。
▶ 故障の原因になります。
- ・皮膚疾患のある方、体の一部に原因不明の慢性疼痛がある方は、使用前に医療従事者にご相談ください。
- ・マダニに噛まれた場合はすぐに医師の診断を受けてください。噛まれることで、ダニ媒介脳炎（TBE）やライム症などの病原体に感染する可能性があります。
- ・かゆみの悪化、皮膚の腫れ、めまい、吐き気、息切れ、血圧の低下や上昇などの初期症状が現れた場合は直ちに医師の診断を受けてください。
- ・本製品を使用する人の感度や皮膚の部位によっては、治療温度が不快に感じられたり、皮膚が赤くなったり、まれに炎症を起こすことがあります。
- ・本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

各部の名称

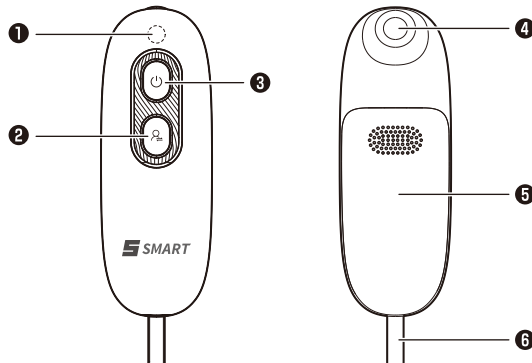

- ① LED
- ② 加熱ボタン
- ③ 電源ボタン
- ④ 加熱プレート
- ⑤ 電池カバー
- ⑥ シリコンストラップ

使用方法

ご使用前に刺された部分に針などが残っていないことを確認してください。刺された直後に使用するのが最も効果的です。かゆみや腫れが出てからでは本製品の効果が限定的になります。

1. 電池カバーを開け、単4形アルカリ乾電池2本を装着し、再度電池カバーを閉めます。
2. 電源ボタンを押し、製品の電源を入れます。電源が入るとLEDが緑色に点灯し、ブザーが鳴り、製品が使用可能な状態であることを示します。
3. 患部に加熱プレートを当て加熱ボタンを押します。加熱ボタンを押す回数で温度が変わります。

※同じ患部への使用は2分程度の間隔をあげ、1時間に5回までとしてください。

1回	LED青色点灯	47℃±2℃	持続時間3秒	初回使用時や敏感肌の方推奨
素早く2回	LED黄色点灯	50℃±2℃	持続時間6秒	普通肌の方推奨

4. 終了後、ブザーが鳴ったら、製品を患部から外してください。加熱プレートの加熱が自動停止し、LEDが緑色に点灯します。
5. 製品の使用が終了したら、電源ボタンを押し、電源オフしてください。電源オフすると緑色のLEDも消灯します。また5分以上操作しなければ自動で電源オフします。
6. 製品を保管する前に、電源オフしていること、加熱プレートが冷めていることを確認してから保管してください。

※刺されたり噛まれたりした複数の部位に本製品を使用する場合は、その都度アルコールのついた布で消毒してください。消毒することで皮膚に付着した細菌などが次の部位に移る可能性を低下させます。

電池交換のお知らせ

電池残量が減っていると電源を入れた際にブザーが3～4回鳴り、LEDが緑色に点滅し続けます。点滅した状態で加熱ボタンを押しても動作しません。直ちに電池を交換してください。

お手入れ

- ・お手入れの前に、本製品の電源を切り、電池を抜き、加熱プレートが冷めていることを確認してください。
- ・研磨剤入りの洗浄剤を使用したり、本製品を水中に沈めたりしないでください。
- ・加熱プレートを消毒する際は、消毒用アルコールを湿らせた布で清掃してください。

記号について

	BF形 装着部	電撃に対する保護の程度が、BF形装着部であることを示しています。 IEC60601-1規格に規定される要求事項に適合しています。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	EMC適合	本製品はEMC規格「IEC60601-1-2:2014」に適合しています。 ただし、他の医療機器、電子機器との併用において相互に影響を生じる場合があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
	操作指示に従う	操作方法の詳細につきましては、取扱説明書をご参照ください。
IP42	IP42	直径1mm以上のワイヤーや固形物質、垂直より左右15°以内からの水滴によって有害な影響を受けません。

こんなときは

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	乾電池の取り付けが正しくない	電池を再度装着します。
	電池残量がない	電池を交換してください。
加熱されない	電池残量が少ない	電池を交換してください。
ブザーが5回鳴り、LEDが点滅し続ける	製品が故障している可能性があります	電池を交換しても解消しない場合は、お客様サービスセンターに連絡してください。

製品仕様

製品	虫さされヒーラー S-937
製品サイズ	約W34×D24×H110mm
質量	25g（電池含まず）
電源	単4形アルカリ乾電池2本
最高温度	50℃±2℃
機能	敏感肌：3秒、47℃±2℃ 普通肌：6秒、50℃±2℃
耐用年数	3年
予想稼働回数	約300回
対象年齢	3歳～11歳 おとなの監督下のもと、使用可能 12歳以上 単独での使用可能
保管・輸送条件	－10℃～50℃、相対湿度30%～85% 圧力700hPa～1060hPa
使用環境条件	10℃～40℃、相対湿度30%～85% 圧力700hPa～1060hPa

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証書

- 保証期間はご購入後1年です。
- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
- 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示の上、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証の対象とはなりません。
（ア）誤った使用、不注意による故障、または損傷の場合
（イ）保管上の不備・ご使用者様の責によると認められる故障・損傷・紛失の場合
（ウ）分解、改造などを行った場合
（エ）本保証書の提示がない場合、保証書の内容を書き換えられた場合

製品	虫さされヒーラー S-937
お買い上げ年月日	年 月 日 (保証規定に従ってご購入日より1年間保証いたします)
ご購入者様	お名前 ご住所 電話番号
販売店様	お名前 ご住所 電話番号
製造・販売元	シースター株式会社 〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号 お客様サービスセンター https://www.seastar.co.jp/contact/ ☎03-4511-8855 (土日祝・夏季および年末年始休業を除く)

