


鼻水吸引用シリコンノズル (2個セット)

使用方法

〈メルシーポットへの接続の場合〉

ノズルコネクタに直接シリコンノズルを差し込みます。


※奥までしっかりと挿入してください。

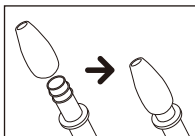

〈ベビースマイルへ接続の場合〉

シリコンノズルを口の広い部分からベビースマイル本体へ差し込みます。

※奥までしっかりと挿入してください。

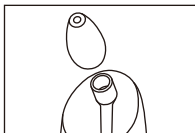

⚠ 注意事項

1. 鼻水吸引用のシリコンノズルです。他の用途には使用しないでください。
2. 直接鼻へ差し込む部品ですので衛生的に保管してください。
3. 使用前は、よく水洗いし水気を取ってから本体に装着してください。
4. 使用後は、すみやかに水洗いしてください。放置しますと鼻水が乾燥し取れにくくなる場合があります。
5. 電子レンジでの消毒はできません。
6. 鋭利なものでシリコンに傷をつけないようご注意ください。
7. やわらかい製品ですが、強く差し込むと鼻腔を傷つける可能性がありますのでご注意ください。
8. 小さなお子さまがいらっしゃる場合は手の届かないところに置いてください。飲み込む恐れがあります。

材質：シリコン

商品名：鼻水吸引用シリコンノズル

製造販売業者

名称：シースター株式会社

住所：〒108-0075

東京都港区港南一丁目8番40号 A-PLACE品川



台紙 外袋:PP

お客様サービスセンター

Tel. 03-4511-8855 受付時間：平日9時～18時(土日祝日除く)