

パルスオキシメータ オキシシリーズ S-127用アプリケーション OXiM SpO₂ 操作説明書

本操作説明書について

本操作説明書の一部または、全部について写真、複写、検索システムへの保存または、他の言語への翻訳を含む電気的手段、機械的手段および、その他のいかなる方法によっても複製または、転用することを禁じます。

⚠ 注意

- ・お使いになる端末の種類やバージョンにより、画面の構成や表示が本操作説明書と異なる場合があります。
- ・お客様のご使用環境により、ご利用戴けない場合やご利用内容に制限が生じる場合があります。
また、ご使用のインターネットの環境や設定により、一部機能が制限される場合があります。
- ・アプリケーション(以下「アプリ」と表記します)の仕様および、画面は改良のため予告なく変更する場合があります。

商標について

- ・ Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod touch は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。Apple Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- ・ Android および Google Play は Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、これらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および
- ・ 上記以外の登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

●アプリをインストールする


1. スマートフォン、タブレットを用意してください。

対応 OS

- ・ iOS10.0 以降 (iphone5 以降)
- ・ Android5.0 以降

2. Apple Store あるいは Google Play ストアから、専用アプリ「OXiM SpO₂」をダウンロードし、インストールしてください。(無償)

アプリをApple Storeで
ダウンロード

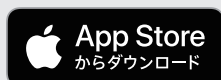

アプリをGoogle Playで
ダウンロード




※オキシシリーズでは、「PI (灌流指数)」は測定できません。また、「Real-time」表示には対応していません。

●利用者を登録する (初回のみ)

1. スマートフォンなどの機器の Bluetooth 機能と位置情報を ON にしてください。
2. 専用アプリ「OXiM SpO₂」のアイコンをタップし、起動します。

3. 「Sign up」 をタップします。

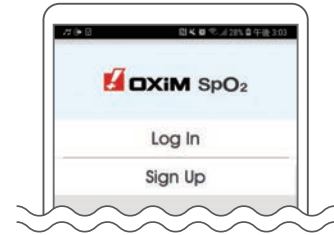

4. 画面の指示にしたがって、利用者の情報を入力します。

- Name…名前（ニックネーム）
- Height…身長
- Weight…体重
- Birthday…生年月日
- Gender…性別（Male：男性 Female：女性）


ここまで入力したら 「Next」 をタップし、次画面に進みます。



5. サインアップ（登録）情報を入力します。

- Valid Email…メールアドレス
- Password…パスワード
- Re-enter Password…パスワード確認


を入力し、「Sign up」 をタップします。

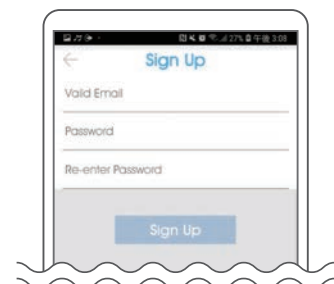

●ログインする（前回ログアウトした場合）

- Email or username…メールアドレス（5 で入力したもの）
- Password…パスワード（5 で入力したもの）

入力したら 「Log in」 をタップします。

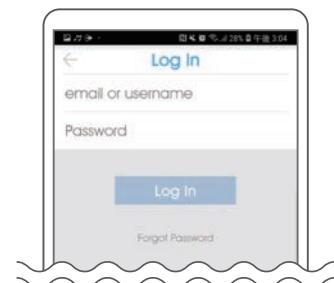

●パルスオキシメータをペアリングする

パルスオキシメータを指に装着して電源を入れます。


「Link Devices」画面の「Link Devices」をタップ、
「Link Success」の画面が出ればペアリング完了です。

「Link Success」の画面が出ない場合は、

- ①スマートフォンの位置情報と Bluetooth 機能が ON になっているか
- ②パルスオキシメータの電源が入っているかを確認してください。




※確認しても接続ができない場合は、画面下部の「Setting」から「My Device」をタップしてください。

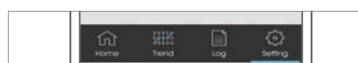



●酸素飽和度を記録する

1. Bluetooth 機能と位置情報を ON にした状態でアプリを立ち上げ、パルスオキシメータを指に装着し、測定します。
2. 画面に測定数値が表示され、自動的に記録されます。
※パルスオキシメータは記録確定後に画面が点滅し、電源が切れます。

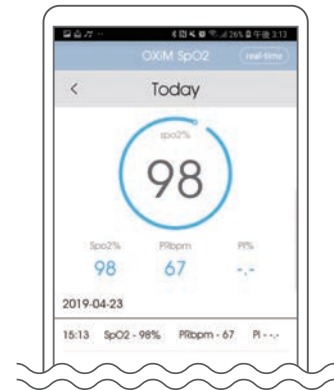

●記録を見る / 削除する

1. 画面下部の「Log」から、過去の記録リストを見ることができます。
2. リストの行を左にスライドすると、「delete」の表示が表れ、記録を削除することができます。
3. 画面下部の「Trend」から、過去の記録をグラフで見ることができます。

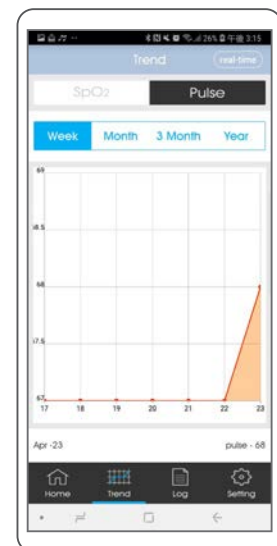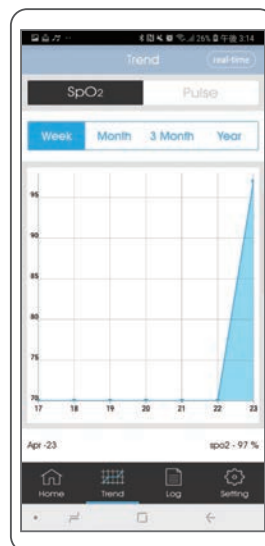

SpO2 の値、脈拍 (Pulse) の切り換えができます。

●設定について

画面下部の「Setting」から、各種設定などを行う事ができます。
名前部分をタップすると、

- ・名前
- ・性別
- ・生年月日
- ・身長
- ・体重

を編集することができます。

また、好きな写真をアイコンとして設定することができます。

こちらをタップ



My Device…パルスオキシメータとの連携を確認します。

Advanced Setting…詳細設定を行います。

- ・ Unit Weight…体重の単位を切り替えます。(キログラム / ポンド)
Length…身長をの単位を切替えます。(フィート / センチメートル)
- ・ Password…パスワードを再設定します。

Help…お客様サービスセンターへのメールを送信できます。

About…アプリのバージョンを確認します。



●ログアウトする

Setting 画面下部 「Log Out」 をタップするとログアウトできます。

